

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN DE SONIC ALERT

Le réveille-matin Sonic Boom modèle SB200ss est garanti contre tout défaut de fabrication pièces et main d'œuvre pour un an à compter de la date d'achat du produit. Durant cette période, Sonic Alert s'engage à réparer ou remplacer à notre discrétion l'appareil SB200ss sans frais de votre part. Faites nous parvenir votre appareil par la poste (à vos frais) accompagné d'une copie de votre preuve d'achat à l'adresse suivante :

Distributeur autorisé : Adaptatech Inc.  
1258, rue Principale  
St-Roch de l'Achigan, Québec  
J0K 3H0  
Tél : 1-877-587-5947

## Réveille-matin Sonic Boom de voyage Avec vibreur de lit Modèle SB200ss




**Mise en garde :** pour éviter tous risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil fonctionne uniquement sur courant alternatif CA 110V / 220-340V (50Hz/60Hz).

Fabriqué en Chine  
Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083  
[www.SonicAlert.com](http://www.SonicAlert.com) 1800-566-3210 V/TTY

**Réveille-matin avec vibreur de lit  
Écran lumineux DEL  
Modèle SB200ss**

**Instructions**

**Important :** Veuillez lire attentivement les instructions qui suivent avant d'utiliser votre appareil, et conservez-les pour vous y référer au besoin.

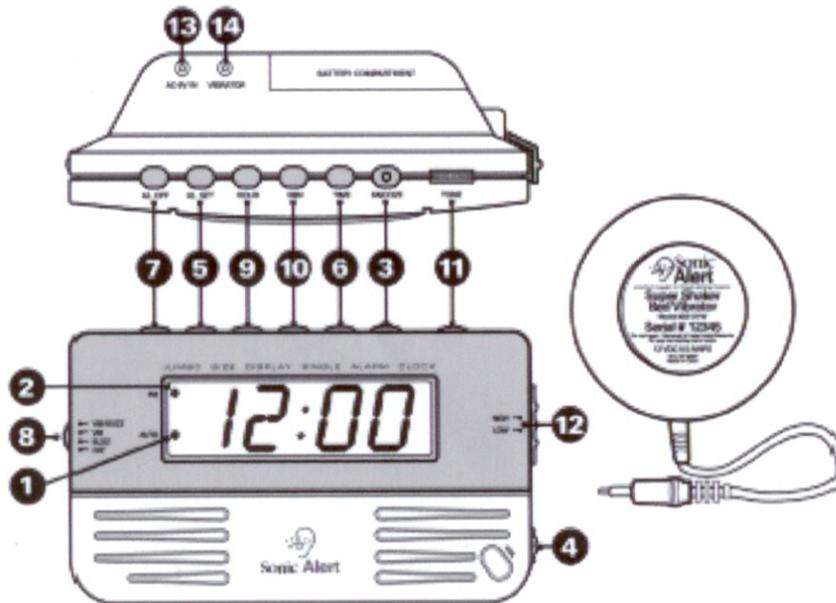

Fonctions :

- 1) Indicateur d'alarme en fonction
- 2) Indicateur PM
- 3) Bouton SNOOZE
- 4) Contrôle du volume
- 5) Bouton de réglage de l'alarme/OFF
- 6) Bouton de réglage de l'heure
- 7) Bouton OFF alarme
- 8) Fonction VIB/BUZZ ON/OFF
- 9) Bouton de réglage de l'heure
- 10) Bouton de réglage des minutes
- 11) Contrôle de la tonalité
- 12) Intensité lumineuse de l'écran HI/Lo
- 13) Prise de branchement CA 9V
- 14) Prise de branchement vibreur

## **Ajustement de l'heure**

- 1) Maintenez enfoncé le bouton d'ajustement TIME (6). Utiliser le bouton HOUR (9) pour régler à l'heure désirée
- 2) Utiliser le bouton MIN (10) pour régler les minutes
- 3) Un point lumineux dans le coin supérieur gauche de l'écran (2) indiquera l'heure PM. En mode AM, le point lumineux n'apparaîtra pas.

## **Réglage de l'alarme**

- 1) Poussez le bouton d'ajustement AL (5). Suivez la même procédure telle que mentionnée plus haut pour l'ajustement de l'heure.
- 2) Assurez-vous que l'heure de réveil est bien en mode AM ou PM selon vos besoins (2). Maintenez bien enfoncé le bouton ALARM lors du réglage, tout en utilisant simultanément les boutons HOUR et MIN.

## **Fonction SNOOZE**

Le bouton SNOOZE (3) permet de reporter l'alarme de 9 minutes, une fois qu'elle est déclenchée. L'alarme sonnera à nouveau dans 9 minutes, vous permettant de dormir un peu plus longtemps. Vous pouvez répéter le report de l'alarme jusqu'à un maximum de 59 minutes.

## **Différentes alarmes**

Ajustez l'heure de l'alarme selon vos besoins, et glissez le bouton VIB/BUZZ, VIB, BUZZ, OFF (8) à la position désirée. VIB/BUZZ pour avoir deux alarmes – vibreur et sonore- ou VIB pour vibreur seulement ou encore BUZZ pour alarme sonore seulement. En position OFF, l'alarme ne sonnera pas.

## **Tonalité**

L'ajustement de tonalité se fait à l'aide du bouton TONE (11) situé sous l'appareil dans le coin supérieur droit.

## **Volume**

L'ajustement du volume se fait à l'aide du bouton VOLUME (4) situé sous l'appareil dans le coin supérieur droit.

## **Vibreur de lit**

- 1) Brancher le vibreur de lit dans la prise VIBRATOR
- 2) Mettre le bouton (8) en position VIB ou VIB/BUZZ
- 3) Placer le vibreur sous votre oreiller ou votre matelas

## **Prise de branchement CA 9V**

Relier l'appareil à votre prise de courant à l'aide de la prise 9V CA. Brancher le fil dans la prise située à côté de la prise VIBRATOR au dos de l'appareil. Attention de ne pas confondre les deux prise de branchement.

## **Pile d'urgence**

Pour utiliser la pile d'urgence, vous pouvez installer une pile alcaline 9V au dos de l'appareil, sous le couvercle à cet effet. Pile non incluse.

## **Informations générales**

Puissance : 110 Volts, Consommation 8 Watts, 60Hz