



www.prevenchute.com

BRAS D'APPUI RELEVABLE

ATTENTION :

Les Bras d'appui doivent être obligatoirement fixés sur des murs construits solidement. Les fixations doivent être choisies en fonction du mur support. En cas de doute, consultez un professionnel.

Le bras d'appui sans pied doit être réservé à une fixation dans un mur en parpaing. Les murs en plaques de plâtres sont prohibés.

Fixation :

Disposez le bras d'appui contre le mur à la hauteur désirée.

Important : Pour la référence avec pied, il est nécessaire que la hauteur choisie corresponde à un réglage précis du pied en hauteur. Vous pouvez ajuster la hauteur du pied en enlevant le clip gris, en ajustant la hauteur et en remplaçant le clip gris.

Après avoir ajusté cette hauteur, marquez les positions des vis sur le mur support

Percez le mur aux endroits marqués avec une perceuse appropriée au mur support. Utilisez des chevilles et des vis adaptées au mur support (mur plein, briques ou creux, etc...). En cas de doute, consultez un professionnel.

Après avoir percé les trous aux emplacements désirés, fixez le bras d'appui avec les 5 espaces.

Utilisation :

Lorsque le bras d'appui est en position relevée, vous pourrez le rabaisser en soulevant le bras doucement et en le ramenant vers vous. Le fait de le soulever permet de désengager le cran de sûreté.

Lorsque le bras d'appui est en position d'utilisation, il suffit de le relever pour qu'il se bloque automatiquement en position relevé, cran de sûreté enclenché.