



Fauteuil de bain pivotant en inox www.prevenchute.com

Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Suivre les indications et les conserver précieusement !

Si cette aide est utilisée par d'autres personnes, celles-ci doivent être bien informées sur les conseils suivants avant toute utilisation.

1. Consignes de sécurité

- Vérifier la stabilité du siège de bain, afin d'éviter les glissements et les accidents
- Utiliser la surface d'assise uniquement pour vous asseoir. Ne pas se tenir debout et ne pas l'utiliser d'une autre manière
- Surveiller les enfants lorsqu'ils utilisent le siège de bain.

2. Installation

Ce produit vous permettra de rentrer et de sortir aisément de la baignoire, et s'adapte à la majorité des baignoires standard.

Placer le siège sur la baignoire en s'assurant que le support doté des bras de soutien soit stable et que chacun des 4 bras reposent (2 par 2) sur chaque côté de la baignoire.

Ajuster les 2 manettes de réglages pour stabiliser l'ensemble sur les parois de la baignoire.

L'axe de verrouillage levé (sous le siège), faire alors pivoter le siège perpendiculairement à l'axe de la baignoire pour faciliter l'accès de la personne sur le siège.

Une fois installée, faire pivoter le siège en passant l'une et l'autre jambe dans le bain, et verrouiller l'axe pour stabiliser le siège au dessus de la baignoire.

Pour sortir du bain, lever l'axe et procéder à l'inverse pour sortir du bain, en veillant à la bonne tenue du siège sur la baignoire.

3. Entretien

Le siège de bain doit être entretenu régulièrement avec un liquide ménager domestique non abrasif, ou un désinfectant ; rincer à l'eau chaude et nettoyer avec une éponge, puis sécher.

4. Matériaux

Acier inox époxy et gaines en plastique grises

5. Traitement de déchets

Veillez mettre au rebut ce produit en conformité avec vos directives régionales.

6. Caractéristiques techniques

Poids : 4.2 kg

Poids maximal supporté : 100 kg

Longueur: 78 cm

Largeur: 54 cm

Hauteur: 52 cm

Dimensions de la coque: largeur 40 cm, hauteur 34 cm,



Fauteuil de bain pivotant en inox www.prevenchute.com

profondeur 40 cm

Pivotement: de 90° en 90°

Ce produit est garanti 2 ans, à partir de la date d'achat, contre *tout vice de fabrication*. *Ce produit est biocompatible.*