



Table de Lit roulante et inclinable www.prevenchute.com

Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Suivre les indications et les conserver précieusement !

Si cette aide est utilisée par d'autres personnes, celles-ci doivent être bien informées sur les conseils suivants avant toute utilisation.

1. Consignes de sécurité

- Le produit ne doit pas être rangé ou laissé à l'extérieur - Le produit ne doit pas être chauffé à plus de 50°C
- Aucun poids ne doit être chargé sur la table de lit lorsqu'elle a une inclinaison de 45°
- Ne pas gratter la peinture.

2. Installation

Ajuster la hauteur de la table de lit grâce à la molette placée sur le tube vertical. Une fois la hauteur adéquate trouvée, bien resserrer avec la molette. Avant utilisation, contrôler la stabilité de la table, et bloquer les roues.

Il est possible de placer un livre sur la table lorsqu'elle a une inclinaison de 45°.

Le contour en plastique empêchera le livre de tomber. Ce contour en plastique est spécialement conçu pour empêcher la poussière et l'eau de s'infiltrer dans le plateau.

3. Entretien

Le plateau et le piétement doivent être nettoyés régulièrement à l'aide de liquides non-abrasifs.

4. Matériaux

Le produit se compose d'une structure en acier, d'un plateau mélaminé, de 4 roues, et de 2 freins. Le plateau est également protégé d'un jonc PVC.

5. Traitement de déchets

Veuillez mettre au rebut ce produit en conformité avec vos directives régionales.

6. Caractéristiques techniques

Poids : 9 kg

Poids maximal supporté: 10 kg, en position verticale

Dimensions du plateau : 40*80 cm

Ce produit est garanti 2 ans, à partir de la date d'achat, contre tout vice de fabrication.

Ce produit est biocompatible.