



Ce manuel d'utilisation contient des informations essentielles relatives à une utilisation en toute sécurité et doit être conservé pour référence ultérieure.



Manuel d'utilisation

Tabouret de douche pliable

VB541A

Poids maximum utilisateur: 120kg



Aidapt Bathrooms
Limited Lancots Lane
Sutton Oak
St Helens
Merseyside WA9 3EX UK

UTILISATION PREVUE

Ces articles sont destinés à un usage domestique uniquement.

Le VB541A est un tabouret de douche sûr et sécurisé, doté d'un revêtement antidérapant. Ce tabouret pratique peut être facilement plié pour le rangement.

Poids maximum utilisateur : 120kg

AVANT UTILISATION

Retirez soigneusement tous les emballages. Evitez d'utiliser des couteaux ou tout autre objet tranchant, car cela pourrait endommager la surface du produit.

Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage visible. Si vous constatez un dommage ou suspectez un défaut n'utilisez pas le produit et contactez votre fournisseur pour obtenir de l'aide.



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lors de l'utilisation du tabouret, des précautions de base doivent être respectées.

- Lisez attentivement ce manuel, en vous assurant que toutes les instructions sont bien comprises avant utilisation. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- Inspectez toutes les pièces avant utilisation. N'utilisez pas le produit si des signes de dommage sont constatés.
- Assurez-vous que les pieds sont solidement fixés.
- Le sol doit être propre et de niveau (plat).
- Ne pas se tenir debout sur le tabouret.
- Ne pas dépasser le poids maximal utilisateur : 120kg.
- Assurez-vous que tous les pieds sont réglés à la même hauteur.
- Ce tabouret est destiné à un usage domestique uniquement.
- N'utilisez pas le produit si un dommage est constaté.
N'essayez pas de le réparer, car cela pourrait entraîner des blessures.

LISTE DES COMPOSANTS

Veillez vérifier que tous les éléments ci-dessous sont bien présents dans la boîte.



Si une pièce est manquante, contactez votre fournisseur et n'utilisez pas le tabouret.

1. Assise et structure
2. Pied réglable A - court (x2)
3. Pied réglable B - long (x2)

1.



Aucun outil n'est nécessaire pour assembler le tabouret.

INSTRUCTION DE MONTAGE




Veillez noter que les sections de pieds sont étiquetées et doivent être installées dans les tubes correspondants portant la même identification.

- Placez l'assise sur une surface stable et installez les quatre pieds. Insérez les deux sections de pieds courtes (A) dans les tubes marqués A en appuyant sur le bouton à ressort, puis en faisant glisser la section de pied dans le cadre jusqu'à ce que ce bouton s'enclenche et dépasse dans l'un des trous de réglage de hauteur (fig. 1). Répétez l'opération pour les deux sections longues (B), en les fixant dans les tubes correspondants marqués B.



Il est essentiel que les quatre pieds soient réglés à la même hauteur et que les goupilles de réglage de hauteur soient correctement verrouillées.

Fig. 1

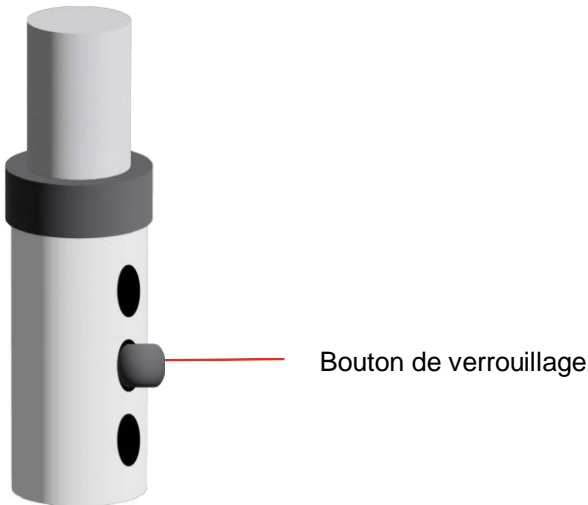

REGLAGE DE LA HAUTEUR



Il est essentiel que les quatre pieds soient réglés à la même hauteur et que les goupilles de réglage de hauteur soient correctement verrouillées.

Votre tabouret de douche dispose de quatre niveaux de réglage en hauteur.

Pour modifier la hauteur de l'assise, appuyez sur le bouton à ressort situé sur le pied, puis faites glisser le pied jusqu'à la position souhaitée, en vous assurant que la goupille s'enclenche correctement dans l'un des trous de réglage.

Répétez l'opération pour chacun des quatre pieds, en veillant à ce qu'ils soient tous réglés à la même hauteur.



Vérifiez que la goupille de verrouillage est bien engagée sur chaque pied avant de vous asseoir.



Bouton de verrouillage

UTILISATION DU TABOURET

Pour ouvrir le tabouret, soulevez l'assise puis poussez le cadre dans le support de l'assise, comme indiqué sur la fig. 2.


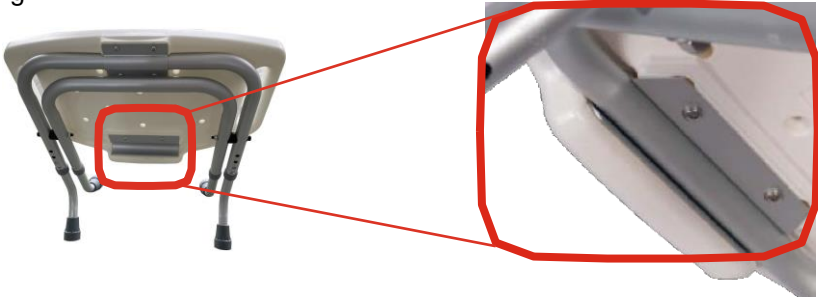
 Il est essentiel de s'assurer que le cadre est correctement engagé dans le support. Avant de vous asseoir, appuyez sur le dessus de l'assise afin de vérifier qu'elle est bien stable et sécurisée.

Fig 2.




Le tabouret est maintenant prêt à être utilisé.


Placez le tabouret dans la douche et vérifiez que les quatre pieds sont réglés à la même hauteur et reposent correctement et de manière stable sur le sol.

Vérifiez que l'assise est bien verrouillée en place avant de vous asseoir.



Asseyez-vous au centre du tabouret.

 Le tabouret de douche doit uniquement être utilisé sur une surface plane.

 Ne vous tenez pas debout sur le tabouret de douche, cela pourrait entraîner des blessures graves.

Pliage du tabouret lorsqu'il n'est pas utilisé :

- Soulevez l'assise tout en maintenant fermement le cadre, afin de dégager l'assise du support.
- Repliez les pieds en faisant attention à la position de vos doigts afin d'éviter tout pincement.

Remplacez toutes les pièces usées, manquantes ou endommagées si nécessaire. En cas de doute, n'utilisez pas le produit et contactez immédiatement votre fournisseur pour obtenir une assistance.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Veillez vous assurer que des contrôles de sécurité sont effectués régulièrement, notamment :

- Vérifiez l'état du tabouret. Il doit être retiré immédiatement de l'utilisation si des fissures ou une déformation du cadre sont constatées.
- Vérifiez que les goupilles de verrouillage des pieds fonctionnent correctement et ne sont pas endommagées.
- Assurez-vous que les embouts antidérapants sont tous présent et en bon état.
- Le tabouret peut être nettoyé à l'aide d'un produit non abrasif ou d'un détergent doux avec un chiffon souple.

INFORMATION IMPORTANTES

Les informations continues dans ce manuel d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie d'un contrat ni comme établissant un quelconque engagement contractuel ou autre.

Veillez faire preuve de bon sens et ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation de ce produit. En tant qu'utilisateur, vous êtes responsable de la sécurité lors de l'utilisation du produit. N'hésitez pas à contacter la personne qui vous a fourni ce produit ou le fabricant si vous avez des questions concernant le montage ou l'utilisation du produit.



Aidapt Bathrooms Limited
Lancots Lane
St Helens
Merseyside, WA9 3EX UK



01744 745020



sales@aidapt.co.uk



www.aidapt.co.uk



Aidapt B.V
Algolweg 22
3821BH
Amersfoort, Netherlands



nederland@aidapt.eu



www.aidapt.eu