



Seahorse Plus Mode d'emploi

- N72012 – Seahorse Plus, Petite**
- N72024 – Seahorse Plus, Moyenne**
- N72036 – Seahorse Plus, Grande**



Sommaire

1. Utilisation prévue
 - 1.1 Utilisateurs
 - 1.2 Environnement d'utilisation
2. Information produit
 - 2.1 Caractéristiques
 - 2.2 Accessoires
3. Ouverture de l'emballage
4. Assemblage
 - 4.1 Assemblage des repose-pieds
 - 4.2 Montage des brides pour les pieds
 - 4.3 Installation des garnitures (en option)
 - 4.4 Montage du pommeau
 - 4.5 Montage de l'appuie-tête
 - 4.6 Montage de la sangle abdominale
 - 4.7 Montage des accoudoirs
5. Fonctionnement général et réglage
 - 5.1 Fonctionnement des freins pour roulettes
 - 5.2 Réglage de la hauteur du siège
 - 5.3 Réglage des repose-pieds
 - 5.4 Réglage de l'appuie-tête
 - 5.5 Fonctionnement du mécanisme d'inclinaison
 - 5.6 Emploi et réglage de la sangle abdominale
 - 5.7 Utilisation du pommeau
 - 5.8 Utilisation du pot
6. Montage et fonctionnement des accessoires
 - 6.1 Montage et utilisation du harnais de poitrine
 - 6.2 Montage et utilisation du harnais de maintien
 - 6.3 Montage et utilisation des appuis antérieurs
7. Entretien et maintenance
 - 7.1 Contrôles mensuels
 - 7.2 Inspection annuelle
 - 7.3 Dépannage
 - 7.4 Nettoyage et désinfection
 - 7.5 Nettoyage de la sangle abdominale et du harnais
8. Pièces de rechange
9. Dimensions
10. Informations générales



Veillez lire attentivement ces instructions dans leur intégralité et vous assurer de les mettre en œuvre. Tout manquement à ces instructions pourrait entraîner un risque de blessures pour l'utilisateur ou le(a) soignant(e). Conservez ce document en lieu sûr afin de vous y référer ultérieurement.

1 Utilisation prévue

1.1 Utilisateurs

La chaise Seahorse Plus existe en trois tailles, conçues pour accueillir un utilisateur de taille plus ou moins grande :

Modèle	Code stock	Fourchette approximative d'âge*	Charge maximum pratique
Seahorse Plus, Petite	N72012	5 à 10 ans	63,5 kg
Seahorse Plus, Moyenne	N72024	10 à 15 ans	89 kg
Seahorse Plus, Grande	N72036	à partir de 15 ans	102 kg

(*NB : les fourchettes d'âge sont approximatives et fournies uniquement à titre indicatif)

MISE EN GARDE : Ne pas dépasser la charge maximum pratique susmentionnée

Nous recommandons fortement qu'une évaluation soit réalisée par un professionnel de santé qualifié (p. ex. : un ergothérapeute) avant d'acheter / d'utiliser la chaise.

Sous réserve de cette évaluation :

- La chaise Seahorse Plus est adaptée pour les utilisateurs **ambulants et non-ambulants** et peut être utilisée avec un appareil de levage approprié.
- La chaise Seahorse Plus est adaptée pour les utilisateurs qui ont besoin d'un **soutien postural modéré**.
- La chaise Seahorse Plus est adaptée pour les utilisateurs ayant des **troubles cognitifs modérés à sévères**, pourvu que ces utilisateurs soient entièrement supervisés pendant l'utilisation.

1.2 Environnement d'utilisation

La chaise Seahorse Plus est conçue pour l'aide à la toilette et à la douche des enfants et des jeunes adultes. Elle peut également être utilisée pour manœuvrer l'utilisateur dans une salle de bains / baignoire. En revanche, elle n'est pas conçue pour le transport normal des utilisateurs, ni pour l'utilisation en extérieur.



Au-dessus des toilettes (en enlevant le pot)



Dans une cabine de douche




Au-dessus de la baignoire

MISE EN GARDE : Ne pas stocker la chaise Seahorse pendant de longues périodes à un endroit où elle serait exposée à un fort ensoleillement – cela pourrait provoquer une décoloration ou dégradation des matériaux.

2 Information produit

2.1 Caractéristiques

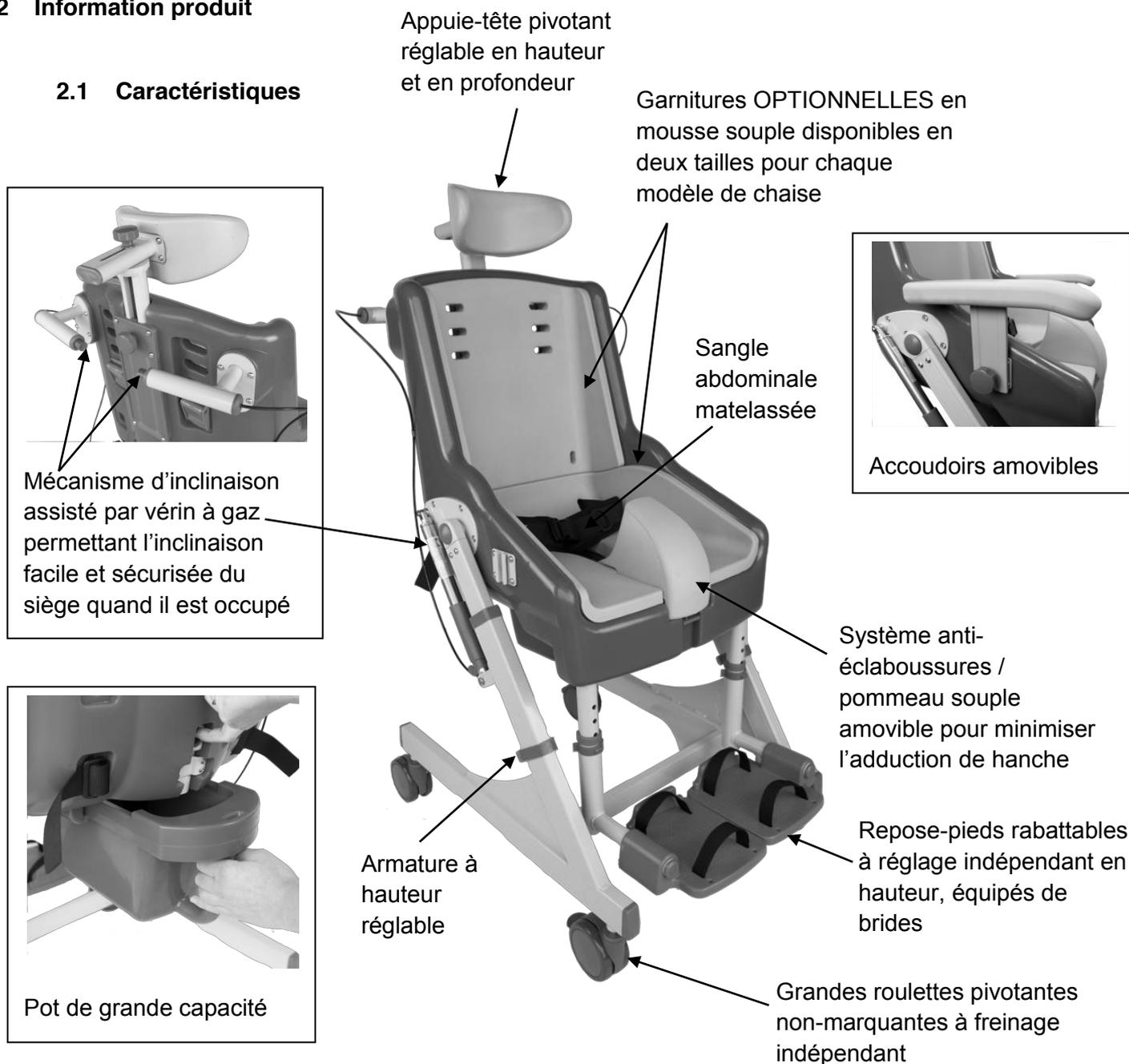

La chaise Seahorse Plus est livrée entièrement assemblée, hormis les éléments suivants, qui seront fournis en vrac dans le carton et doivent être montés :

Pièces standard devant être montées	Accessoires en option (s'ils ont été commandés avec la chaise)
<ul style="list-style-type: none"> • Repose-pieds 	<ul style="list-style-type: none"> • Garnitures minces ou épaisses
<ul style="list-style-type: none"> • Brides 	<ul style="list-style-type: none"> • Appui antérieur
<ul style="list-style-type: none"> • Sangle abdominale 	<ul style="list-style-type: none"> • Harnais de poitrine
<ul style="list-style-type: none"> • Appuie-tête 	<ul style="list-style-type: none"> • Harnais de maintien
<ul style="list-style-type: none"> • Accoudoirs 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pommeau 	

2.2 Accessoires



Garnitures épaisses

N72310 Garniture pour siège et dossier, petite, épaisse (taille 1)

N72334 Garniture pour siège et dossier, moyenne, épaisse (taille 3)

N72668 Garniture pour siège et dossier, grande, épaisse (taille 5)



Garnitures minces

N72322 Garniture pour siège et dossier, petite, mince (taille 2)

N72346 Garniture pour siège et dossier, moyenne, mince (taille 4)

N72679 Garniture pour siège et dossier, grande, mince (taille 6)



Appui antérieur

N72127 Appui antérieur, petit

N72188 Appui antérieur, moyen / grand



Harnais de poitrine

N72139 Harnais de poitrine, petit

N72140 Harnais de poitrine, moyen

N72723 Harnais de poitrine, grand



Harnais de maintien

N72152 Harnais de maintien, petit


N72164 Harnais de maintien, moyen

N72759 Harnais de maintien, grand


3 Ouverture de l'emballage

La chaise Seahorse Plus est livrée dans un carton d'emballage robuste. Elle doit être soigneusement déballée avant utilisation.


MISE EN GARDE : Prendre soin en ouvrant l'emballage de la chaise Seahorse Plus. La chaise est lourde (19 à 25 kg selon le modèle) et doit être soulevée par DEUX personnes.

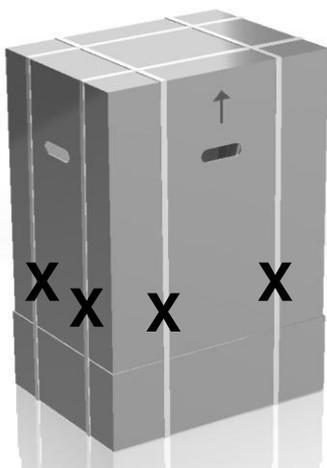


Assurez-vous que le carton est posé au sol avec les poignées orientées vers le haut. Coupez les 4 sangles sécurisant le carton.

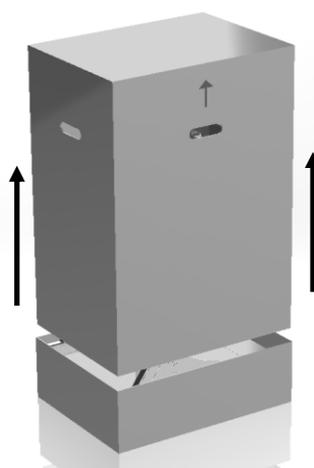

Soulevez le couvercle pour le dégager de la base du carton. Enlevez les boîtes se trouvant à l'intérieur du carton.

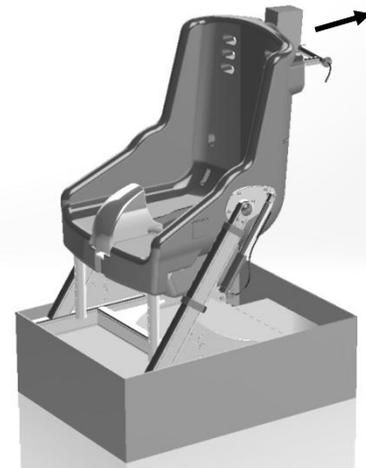

Retirez le sac plastique enveloppant la chaise Seahorse et tout matériau d'emballage fixé à la chaise.

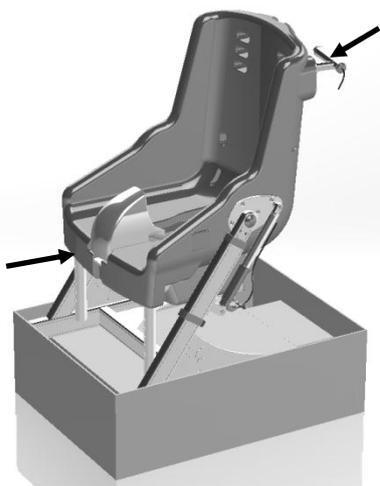

Saisissez la chaise sous le siège à l'avant et par les poignées arrière (2 personnes nécessaires).



Soulevez la chaise (à 2 personnes) pour la dégager de la base du carton et posez la chaise au sol.



Inspectez la chaise pour déceler tout signe de dommage.

Inspectez le produit intégralement avant la première utilisation. Si la chaise est endommagée d'une manière ou d'une autre, veuillez contacter le service client NRS Healthcare : 0345 121 8111 (au Royaume-Uni), ou + 44 (0)1530 232 292 (de l'étranger)

4 Assemblage

4.1 Assemblage des repose-pieds



Quand vous sortez la chaise de l'emballage, les repose-pieds ne sont pas montés. Vous devez les monter sur la chaise avant la première utilisation.

1. Inclinez la chaise en position semi-allongée (voir la section 5.5)
2. Faites glisser les repose-pieds sur les tubes de support de repose-pieds (NB : les repose-pieds gauche et droit ne sont pas interchangeables). Réglez le repose-pieds à la hauteur voulue et alignez les trous des tubes intérieur et extérieur pour qu'ils soient bien en face les uns des autres.
3. Insérez les deux clips de réglage en hauteur (A) comme indiqué. Remettez la chaise en position verticale

4.2 Montage des brides pour les pieds



Les brides pour les pieds sont fournies en vrac dans un sac, elles doivent être montées par le client si leur utilisation est nécessaire.

1. Relâchez la boucle de réglage en plastique et faites passer la bride dans les fentes des repose-pieds, en laissant la boucle sur le dessus.
2. Faites passer l'extrémité libre de la bride dans la boucle et serrez bien.

4.3 Installation des garnitures (en option)



Les garnitures ne sont pas montées sur la chaise quand vous la sortez de l'emballage. Il existe deux tailles de garniture (épaisse et mince) pour chaque modèle de chaise. Si elles ont été commandées au moment de l'achat, elles seront fournies séparément dans une boîte qui se trouvera dans le carton d'emballage.

Enlevez les garnitures de l'emballage et posez-les dans le siège, tel qu'illustré, en vous assurant de bien les enfoncer dans les fentes prévues dans le dossier du siège.

Il est recommandé de monter d'abord la garniture du siège, puis celle du dossier.


4.4 Montage du pommeau



Le pommeau est fourni séparément. Il doit être monté APRÈS avoir installé les garnitures du siège et du dossier.

Pour installer le pommeau dans le siège, faites glisser les rainures du pommeau sur les deux nervures du siège moulé. Poussez fermement sur le pommeau jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

4.5 Montage de l'appuie-tête

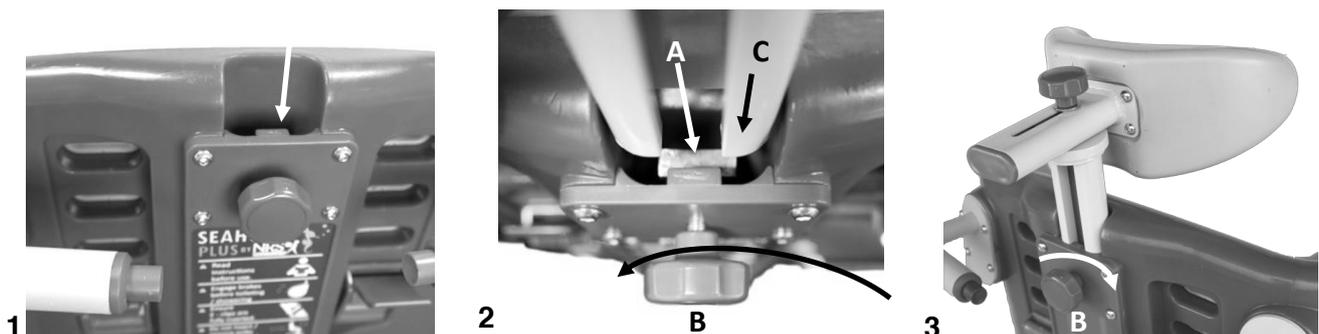

L'appuie-tête est livré avec la chaise dans une boîte séparée. Il doit être monté avant la première utilisation.

- 1 Le siège étant en position verticale, localisez la fente pour l'appuie-tête en haut de la chaise
- 2 Desserrez l'écrou en T (A) en tournant la molette (B) dans le sens antihoraire. Insérez la colonne verticale de l'appuie-tête (C) dans la fente, au-dessus de l'écrou en T (A). Si la colonne (C) ne glisse pas au bas de la fente, essayez de régler la molette (B), jusqu'à ce que la colonne glisse au-dessus de l'écrou en T (A)
- 3 Une fois qu'elle est dans la position désirée, serrez bien la molette (B) dans le sens horaire.

MISE EN GARDE : Nous recommandons vivement l'utilisation de l'appuie-tête, surtout pendant l'inclinaison de la chaise, pour assurer le bon maintien de la tête de l'utilisateur.

4.6 Montage de la sangle abdominale

La sangle abdominale doit être installée sur la chaise avant l'utilisation. Assurez-vous de disposer de la bonne taille pour le modèle de chaise (petite = N72802, moyenne = N72814, grande = N72826).



- 1 Pour installer la sangle abdominale, faites passer les deux boucles arrière (A) dans les fentes de la garniture pour siège et du siège. L'étiquette de la chaise Seahorse doit se trouver à gauche, vue de l'avant.
- 2 Faites passer les boucles (A) entièrement à travers les fentes, en les faisant tourner à 90 degrés.
- 3 Les sangles doivent alors être tirées de l'avant, pour que les boucles se logent à l'arrière et au ras du siège. Assurez-vous que les boucles ne peuvent pas passer au travers du siège, en tirant dessus fermement.

MISE EN GARDE : Utiliser uniquement la sangle abdominale livrée avec la chaise. La vérifier régulièrement pour dépister des signes d'usure ou de dommages et la remplacer si nécessaire (voir la liste des pièces de rechange, à la section 8)

4.7 Montage des accoudoirs



Les accoudoirs sont livrés avec la chaise, dans une boîte séparée. Ils doivent être montés avant la première utilisation.

1. Pour les installer, desserrez la molette (A) et insérez les accoudoirs dans les plaques de part et d'autre de la chaise (NB : les accoudoirs gauche et droit ne sont pas interchangeables, et ils doivent s'incliner vers le bas à l'avant).
2. Une fois que les accoudoirs sont correctement insérés, serrez bien la molette (A).

MISE EN GARDE : La chaise est conçue pour être utilisée avec les accoudoirs en place. On peut les enlever s'ils sont gênants pour s'asseoir / se lever de la chaise (par exemple pour soulever l'utilisateur avec un appareil de levage, ou lors des transferts latéraux). Toutefois, les accoudoirs (ou les appuis antérieurs facultatifs) doivent toujours être présents pour utiliser le mécanisme d'inclinaison de la chaise.

MISE EN GARDE : Les accoudoirs ne sont pas conçus pour supporter le poids de l'utilisateur. Ne pas s'asseoir dessus, sinon ils pourraient être endommagés.



4 Fonctionnement général et réglage

La chaise Seahorse Plus est conçue pour l'aide à la toilette et à la douche des enfants et des jeunes adultes. Elle peut être utilisée au-dessus des toilettes, ou avec le pot fourni.

La chaise Seahorse Plus peut être utilisée pour manœuvrer l'utilisateur dans une baignoire. Elle n'est pas étudiée pour servir au transport normal de l'utilisateur, à la place d'un fauteuil roulant.

La chaise Seahorse Plus est fabriquée à partir de matériaux résistants à la corrosion. Cependant, il faut l'essuyer après chaque utilisation. La chaise Seahorse Plus n'est pas conçue pour l'utilisation ou le stockage à l'extérieur.

MISE EN GARDE : Avant d'utiliser la chaise pour la première fois, s'assurer qu'elle est entièrement assemblée (voir la section 4), et que la chaise est réglée correctement pour l'utilisateur, conformément aux instructions ci-dessous.

MISE EN GARDE : Avant d'asseoir l'utilisateur dans la chaise ou de le lever, s'assurer que les roulettes sont verrouillées (sauf si un appareil de levage est utilisé). S'assurer que les repose-pieds sont repliés vers le haut et que l'utilisateur ne se tient pas debout sur les repose-pieds.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser la chaise pour monter ou descendre l'utilisateur sur des rampes ou pentes raides.

MISE EN GARDE : Ne pas laisser un utilisateur sans surveillance dans la chaise ; ne pas laisser la chaise dans un environnement non supervisé.

MISE EN GARDE : S'assurer que la hauteur du siège est bien réglée (voir la section 5.2) et que le pot est retiré (voir la section 5.8) avant d'utiliser la chaise au-dessus des toilettes. Positionner avec soin la chaise au-dessus des toilettes pour s'assurer que l'ouverture du siège est bien alignée au-dessus de la cuvette, afin d'éviter tout débordement.

MISE EN GARDE : Nous recommandons d'utiliser la sangle abdominale en permanence pendant la douche ou le bain, pour réduire le risque que l'utilisateur ne glisse de sa chaise.

5.1 Fonctionnement des freins

La chaise est dotée de 4 roulettes pivotantes verrouillables individuellement. Nous recommandons que les freins soient enclenchés sur toutes les roulettes pivotantes avant d'asseoir l'utilisateur dans la chaise ou de le lever (sauf en cas d'utilisation d'un appareil de levage), ou avant d'utiliser la chaise au-dessus des toilettes ou pour la douche. Au cas où les freins arrière seraient inaccessibles (par exemple lorsque la chaise est positionnée au-dessus des toilettes), assurez-vous d'enclencher au moins les freins avant.




1. Pour enclencher le frein d'une roulette pivotante, appuyez sur la languette se trouvant sur la roulette.
2. Pour relâcher le frein d'une roulette, appuyez sur le bouton se trouvant au-dessus de la languette.
3. Pour une stabilité maximale (surtout en position inclinée), les roulettes arrière doivent être orientées vers l'arrière et verrouillées.

5.2 Réglage de la hauteur du siège

La hauteur du siège est réglable en fonction des différents utilisateurs et pour faciliter le positionnement au-dessus des toilettes.

Quatre trous de réglage sont présents, ce qui permet un ajustement de 108 mm. Chaque position est indiquée par une ligne sur le haut du montant et un nombre (1 à 4), 1 étant le réglage le plus bas et 4 étant le plus élevé.

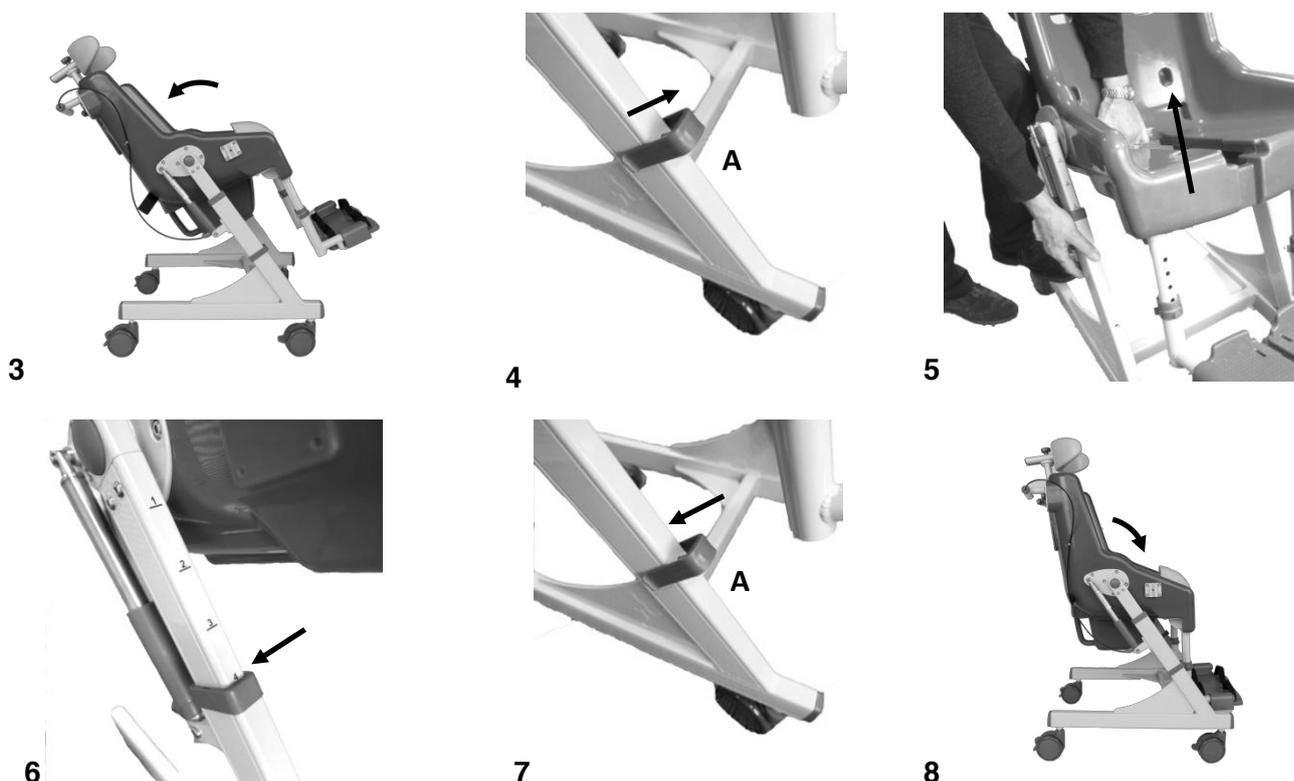

MISE EN GARDE : Ne jamais régler la hauteur du siège pendant qu'un utilisateur est assis dans la chaise.

- 1 Verrouillez les 4 roulettes (voir la section 5.1).
- 2 Retirez le pot (voir la section 5.8).
- 3 Inclinez la chaise jusqu'à ce que le dossier soit dans le prolongement des montants inclinés (voir la section 5.5).
- 4 Enlevez les deux clips de réglage de hauteur (A).
- 5 Debout derrière le siège, placez votre pied sur la barre inférieure de l'armature. Cela empêchera l'armature de bouger lorsque vous soulevez le siège. Passez votre main à travers le trou ménagé pour le pot et soulevez ou abaissez le siège. Cette opération requiert une certaine force et peut nécessiter deux personnes.
- 6 Alignez la marque de la hauteur souhaitée sur le montant intérieur avec celle du montant extérieur.
- 7 Insérez le clip de réglage en hauteur (A). Répétez sur l'autre montant, en veillant à utiliser le même marquage de hauteur.
- 8 Remettez la chaise en position verticale (voir la section 5.5)

MISE EN GARDE : S'assurer que les deux clips de réglage de hauteur sont solidement installés avant l'utilisation

5.3 Réglage des repose-pieds




La hauteur des repose-pieds peut être réglée individuellement avec au total 100 mm de hauteur réglable sur le petit et le moyen modèle de chaise et 125 mm de hauteur réglable sur le grand modèle.

- 1 Pour ajuster, retirez le clip de réglage (A) du repose-pied.
- 2 Poussez le repose-pied vers le haut ou vers le bas et assurez-vous que les trous des tubes intérieur et extérieur sont bien alignés.
- 3 Reposez les clips de réglage (A).

MISE EN GARDE : S'assurer que les clips de réglage sont bien emboîtés avant d'utiliser la chaise.

MISE EN GARDE : Si la hauteur du siège est fixée à son plus bas niveau (voir la section 5.2) et les repose-pieds sont réglés sur la position la plus basse, nous vous recommandons d'incliner légèrement le siège pour vous assurer que les roulettes avant peuvent tourner librement.

5.4 Réglage de l'appuie-tête

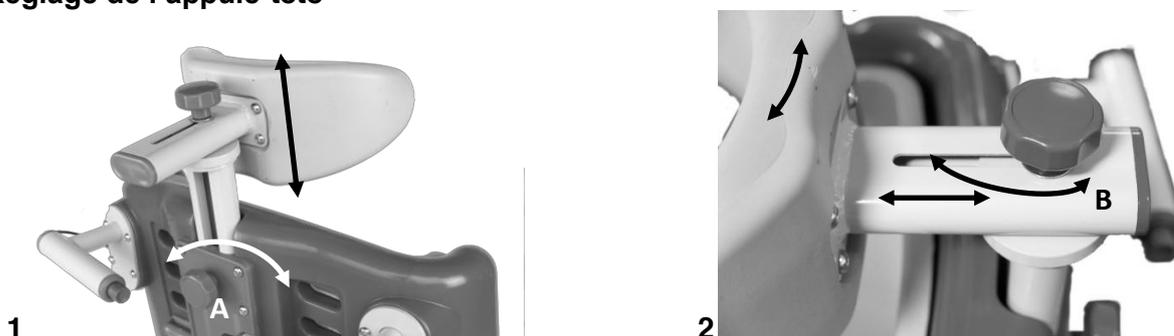


- 1 Pour régler l'appuie-tête à la verticale, desserrez la molette de réglage (A) dans le sens antihoraire, relevez ou abaissez l'appuie-tête, puis serrez la molette de réglage.
- 2 L'appuie-tête est réglable vers l'avant et l'arrière et vers la gauche et la droite, en relâchant la molette de réglage supérieure (B) ; faites ensuite glisser l'appuie-tête vers l'avant ou vers l'arrière, ou tournez vers la gauche ou la droite, puis serrez la molette de réglage supérieure.

MISE EN GARDE : S'assurer que les molettes de réglage sont bien serrées avant l'utilisation.

5.5 Fonctionnement du mécanisme d'inclinaison

La chaise peut s'incliner de 40° par rapport à la verticale, dans un mouvement continu et sans à-coups. Ce mouvement est contrôlé par des vérins à gaz de chaque côté (un seul vérin à gaz sur le petit modèle)

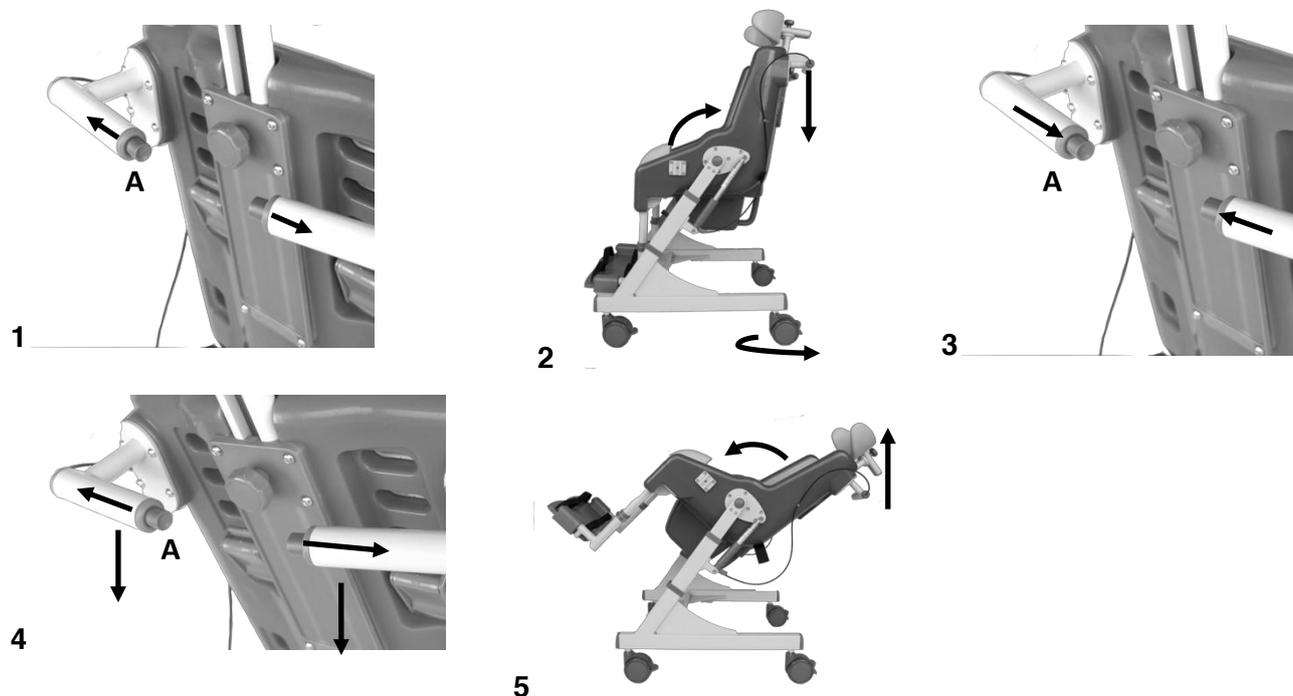


MISE EN GARDE : S'assurer que les bras de l'utilisateur sont posés sur les accoudoirs et les pieds calés sur les repose-pieds avant d'utiliser le mécanisme d'inclinaison.

MISE EN GARDE : Avant d'incliner la chaise, s'assurer que les roues arrière sont orientées vers l'arrière et verrouillées.

- 1 Le mécanisme d'inclinaison est actionné en appuyant sur les deux* boutons rouges (A) des poignées arrière. La chaise ne s'inclinera pas si l'on n'appuie pas sur les deux boutons (* le petit modèle n'a qu'un seul bouton).
- 2 Appuyez sur les poignées pour incliner la chaise.
- 3 Lorsque l'angle désiré est atteint, relâchez les deux boutons rouges pour que la chaise se bloque dans cette inclinaison.
- 4 Pour ramener la chaise en position verticale, appuyez sur les poignées pour soutenir le poids de l'occupant et appuyez sur les boutons rouges (A) pour débloquer.
- 5 Ramenez la chaise en position verticale en relevant doucement les deux poignées. Une fois que la chaise est dans la position souhaitée, relâchez les deux boutons rouges.

5.6 Utilisation et réglage de la sangle abdominale

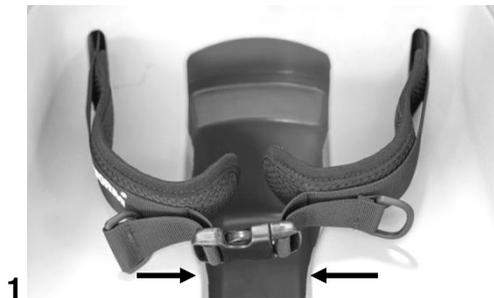

1




2

- 1 Positionnez l'utilisateur dans la chaise et bouclez la sangle abdominale sans serrer autour de la taille.
- 2 Tirez sur les deux anneaux en forme de D à l'avant pour serrer la sangle abdominale.

MISE EN GARDE : S'assurer que la sangle abdominale est correctement réglée pour l'utilisateur et bien serrée. Si les sangles abdominales sont mal réglées, l'utilisateur risque de glisser vers l'avant.

Attention : Veiller à ce que la sangle abdominale ne tombe pas dans le pot quand l'utilisateur s'assoit dans la chaise ou se lève. Coincer la sangle entre la chaise et l'accoudoir pour la tenir à l'écart.

5.7 Utilisation du pommeau

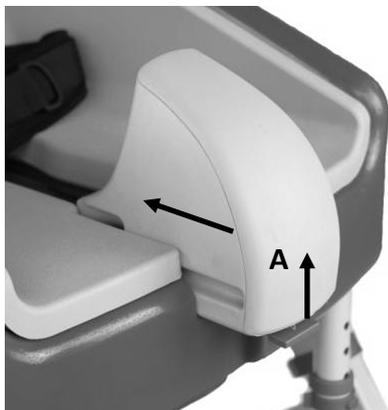


Le pommeau accompagnant la chaise permet d'aider à positionner l'utilisateur. Il permet également de maintenir en place la garniture du siège.

Pour installer le pommeau dans le siège, faites glisser les rainures du pommeau sur les deux nervures du siège moulé. Poussez fermement sur le pommeau jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

Pour retirer le pommeau, soulevez le clip (A) et tirez sur le pommeau en le faisant glisser.

MISE EN GARDE : Faire attention en insérant le pommeau pour minimiser le risque de piégeage de l'utilisateur.

5.8 Utilisation du pot

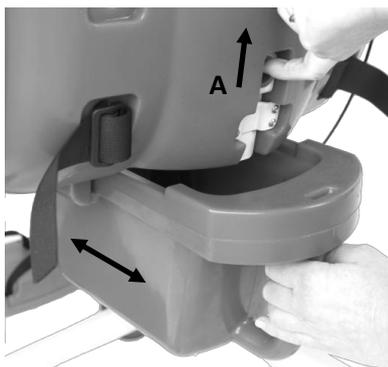

Pour insérer le pot, soulevez le loquet du pot (A) et alignez le pot en face des deux rainures sous le siège, avant de le faire glisser en place. Relâchez le loquet (A) qui devrait alors s'enclencher dans l'encoche du pot.

Pour enlever le pot, soulevez le loquet (A) et retirez le pot, en veillant à éviter tout débordement.

MISE EN GARDE : Nous recommandons de ne pas insérer / retirer le pot quand l'utilisateur est assis dans la chaise, afin de minimiser le risque de piégeage.


MISE EN GARDE : Le pot risque d'être assez lourd s'il est plein.

6 Fonctionnement des accessoires

6.1 Montage et utilisation du harnais de poitrine

Le harnais de poitrine est un accessoire qu'on peut commander. Si cela n'a pas été fait au moment de l'achat de la chaise, vous pouvez le commander directement auprès du service client NRS Healthcare en appelant le : 0345 121 8111 (au Royaume-Uni), ou + 44 (0) 1530 232 292 (de l'étranger)

S'il a été commandé avec la chaise, vous trouverez le harnais dans un sac en ouvrant l'emballage. Il doit être installé sur la chaise avant l'utilisation. Assurez-vous de disposer de la taille de harnais de poitrine qui convient pour la chaise (petit = N72139, moyen = N72140, grand = N72723).

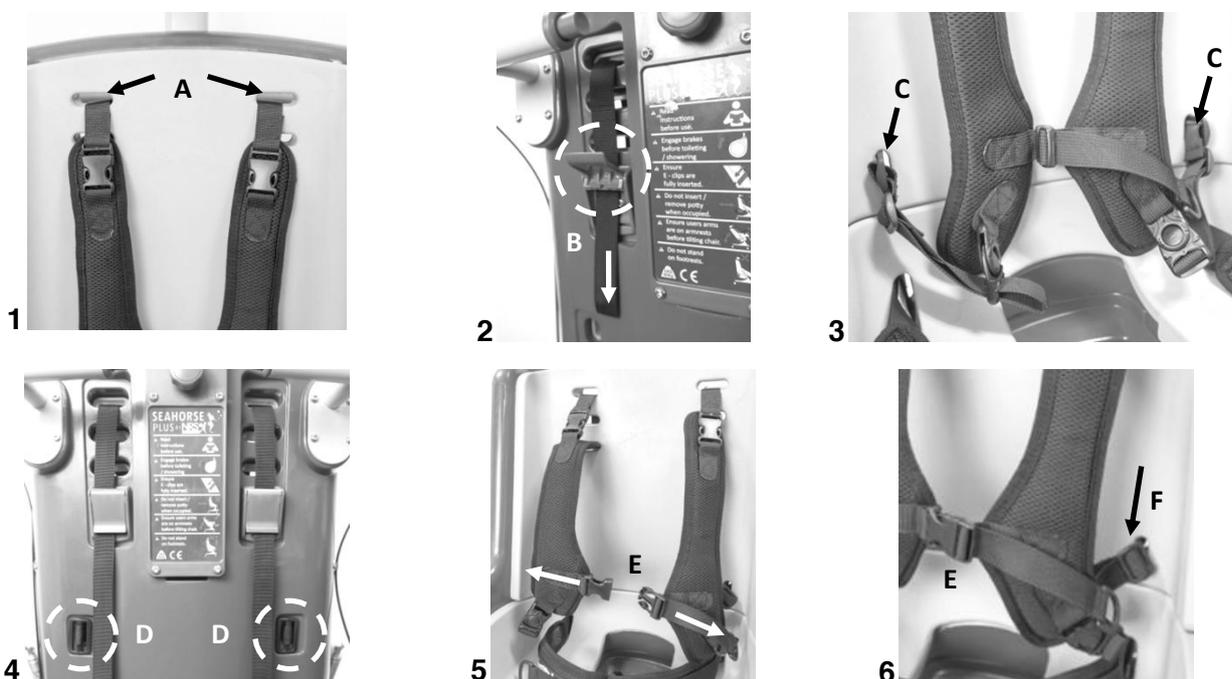


1. Le harnais de poitrine s'installe en faisant passer les sangles supérieures (A) à travers les fentes supérieures du dossier et de la garniture du siège (si elle est installée). Grâce aux trois paires de fentes, le harnais peut être réglé à différentes hauteurs.
2. Faites ensuite passer les sangles supérieures à travers la came de verrouillage (B) et fermez le loquet. Laissez un mou suffisant à ce stade.
3. Faites passer les boucles des sangles inférieures (C) à travers les fentes inférieures du dossier et de la garniture du siège (si elle est installée), en les faisant tourner à 90 degrés et en poussant fermement dessus.
4. Tirez à fond à l'avant sur les sangles inférieures, pour ramener les boucles (D) au ras, à l'arrière du siège. Assurez-vous que les boucles ne peuvent pas passer au travers du siège, en tirant dessus fermement.
5. Ouvrez la boucle centrale sur le harnais, desserrez la sangle avant dans la boucle avant d'asseoir l'utilisateur dans la chaise. Depuis l'arrière de la chaise, serrez les sangles supérieures en ouvrant la came de verrouillage (B) et en tirant la sangle vers le bas avant de fermer le loquet.
6. Pour ajuster les sangles inférieures, vous pouvez serrer les curseurs de réglage (F) de chaque côté. Fermez la boucle centrale (E) pour sécuriser l'utilisateur.

6.2 Montage et utilisation du harnais de maintien

Le harnais de maintien est un accessoire qu'on peut commander. Si cela n'a pas été fait au moment de l'achat de la chaise, vous pouvez le commander directement auprès du service client NRS Healthcare en appelant le :

0345 121 8111 (au Royaume-Uni), ou + 44 (0) 1530 232 292 (de l'étranger)

S'il a été commandé avec la chaise, vous trouverez le harnais dans un sac en ouvrant l'emballage. Il doit être installé sur la chaise avant l'utilisation. Assurez-vous de disposer de la taille de harnais de maintien qui convient pour la chaise (petit = N72152, moyen = N72164, grand = N72759).

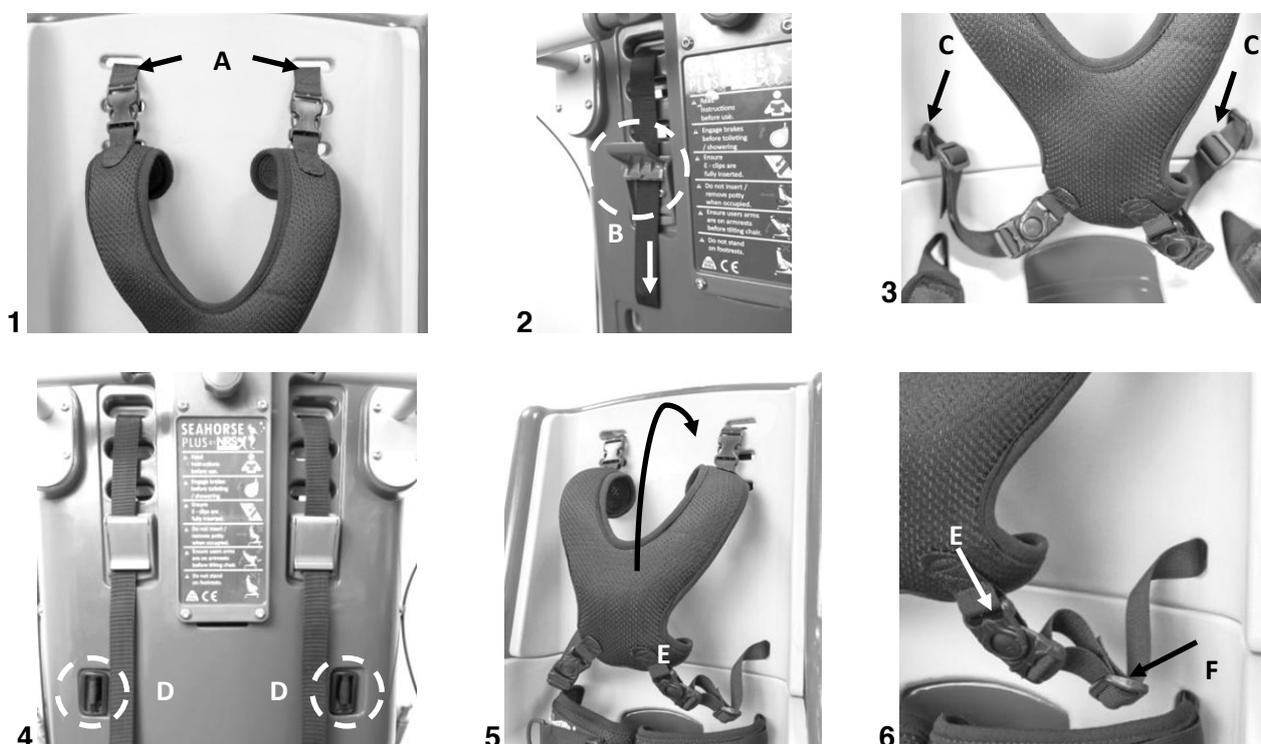


1. Le harnais de maintien s'installe en faisant passer les sangles supérieures (A) à travers les fentes supérieures du dossier et de la garniture du siège (si elle est installée). Grâce aux trois paires de fentes, le harnais peut être réglé à différentes hauteurs.
2. Faites ensuite passer la sangle supérieure à travers la came de verrouillage (B) et fermez le loquet. Laissez un mou suffisant à ce stade.
3. Faites passer les boucles des sangles inférieures (C) à travers les fentes inférieures du dossier et de la garniture du siège (si elle est installée), en les faisant tourner à 90 degrés et en poussant fermement dessus.
4. Tirez à fond à l'avant sur les sangles inférieures, pour ramener les boucles (D) au ras, à l'arrière du siège. Assurez-vous que les boucles ne peuvent pas passer au travers du siège, en tirant dessus fermement.
5. Déclipsez les sangles inférieures (E) du harnais, soulevez le harnais et asseyez l'utilisateur dans la chaise. Rabattez le harnais sur l'utilisateur et attachez à nouveau les sangles inférieures. Depuis l'arrière de la chaise, serrez les sangles supérieures en ouvrant la came de verrouillage (B) et en tirant la sangle vers le bas avant de fermer le loquet.
6. Pour ajuster les sangles inférieures, vous pouvez serrer les curseurs de réglage (F) de chaque côté.

6.3 Montage et utilisation des appuis antérieurs

Les appuis antérieurs sont des accessoires qu'on peut commander. Si cela n'a pas été fait au moment de l'achat, vous pouvez les commander directement auprès du service client NRS Healthcare en appelant le : 0345 121 8111 (au Royaume-Uni), ou + 44 (0) 1530 232 292 (de l'étranger)

Les appuis antérieurs sont conçus pour fournir un point d'appui supplémentaire à l'utilisateur pour l'utilisation des toilettes. Les appuis antérieurs se posent à la place des accoudoirs. Si vous les avez commandés, assurez-vous de disposer de la taille qui convient pour la chaise (petite = N72127, moyenne / grande = N 72188).

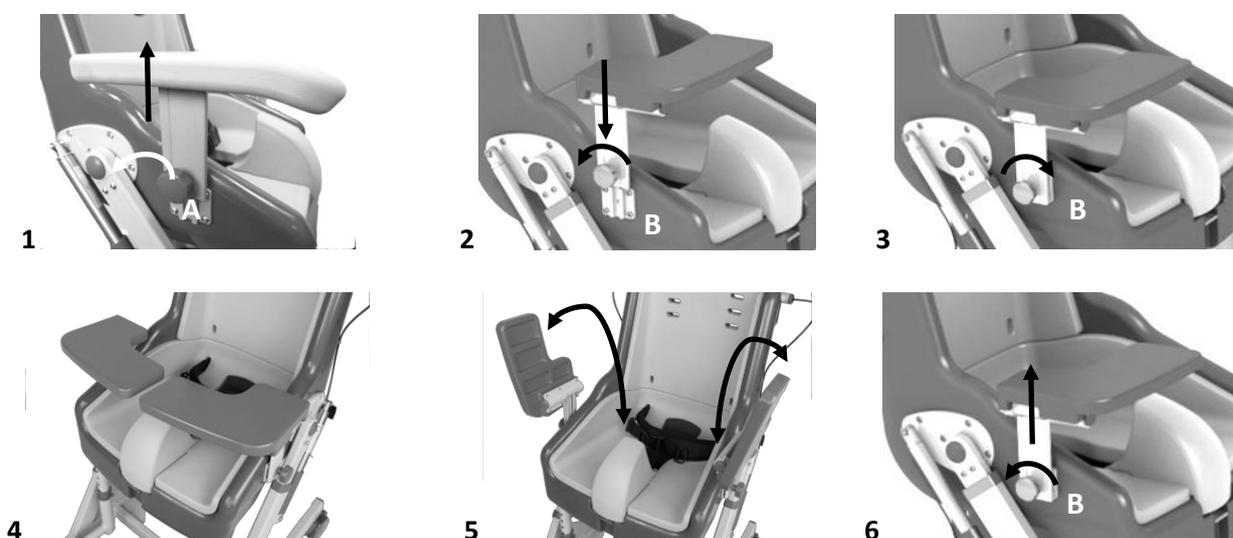

1. Avant de monter les appuis antérieurs, enlevez d'abord chaque accoudoir en dévissant la molette (A) sur le côté de la chaise et tirez vers le haut pour dégager l'accoudoir des plaques métalliques.
2. Pour monter l'appui antérieur, desserrez la molette (B) et introduisez l'appui dans les plaques de part et d'autre de la chaise.
3. Une fois que les appuis antérieurs sont bien enclenchés en place, serrez la molette (B).
4. NB : les appuis antérieurs gauche et droit ne sont pas interchangeables et doivent avoir le même aspect que la photo ci-dessus à l'installation, avec la découpe face à l'utilisateur.
5. Les appuis antérieurs sont rabattables, afin que l'utilisateur puisse facilement s'asseoir dans la chaise et se relever. Pour relever l'appui, il suffit de saisir la surface en plastique et de rabattre vers le haut jusqu'à l'arrêt. Pour l'abaisser, inversez la procédure.
6. Pour retirer les appuis antérieurs, desserrez simplement la molette (B) et tirez l'appui antérieur vers le haut, en le faisant glisser des plaques de métal sur le côté de la chaise.



MISE EN GARDE : La chaise est conçue pour être utilisée avec les accoudoirs ou les appuis antérieurs en place. Les appuis antérieurs peuvent être enlevés s'ils sont gênants pour s'asseoir / se lever de la chaise (par exemple pour soulever l'utilisateur avec un appareil de levage, ou lors des transferts latéraux). Toutefois, les appuis antérieurs doivent toujours être installés avant d'utiliser le mécanisme d'inclinaison de la chaise.

MISE EN GARDE : Les appuis antérieurs ne sont pas conçus pour supporter entièrement le poids de l'utilisateur. Ne pas s'asseoir dessus, sinon ils pourraient être endommagés.

6 Entretien et maintenance

La chaise Seahorse Plus est un équipement complexe. Elle est très robuste, mais au fil du temps, particulièrement en cas d'usage intensif (surtout dans un environnement multi-utilisateurs, ou si elle est utilisée avec des clients présentant des mouvements involontaires de grande ampleur), elle pourrait subir des dommages, auquel cas son utilisation serait dangereuse. Nous recommandons vivement de procéder régulièrement à des contrôles pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement :

7.1 Contrôles mensuels

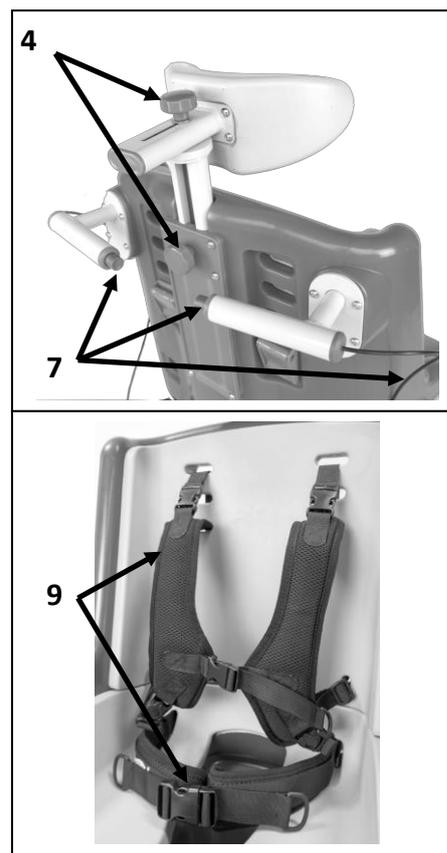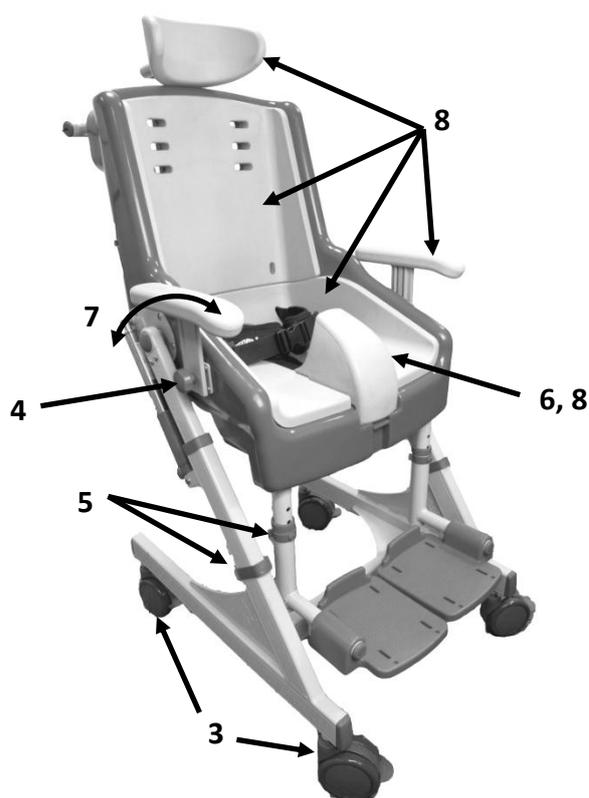

1. Vérifiez qu'aucune pièce n'est desserrée ou n'apparaît endommagée, qu'aucune vis n'est desserrée ou manquante.
2. Vérifiez que le siège est bien sécurisé et qu'il ne présente aucun jeu.
3. Vérifiez que toutes les roulettes pivotantes tournent librement et que les freins s'enclenchent correctement (voir la section 5.1). Si l'un des freins ne fonctionne pas, cessez immédiatement d'utiliser la chaise.
4. Vérifiez le bon serrage de toutes les fixations, en particulier les molettes des accoudoirs (voir la section 4.7), les molettes de l'appuie-tête (voir la section 5.4) et les molettes des appuis antérieurs (voir la section 6.3).
5. Vérifiez que tous les clips de réglage en hauteur sont bien en place et sécurisés (sections 5.2, 5.3).
6. Vérifiez que le pommeau se verrouille bien en place et ne glisse pas si l'on tire dessus (voir la section 5.7).
7. Vérifiez que le mécanisme d'inclinaison fonctionne sans problème, et qu'il se verrouille correctement lorsqu'on n'appuie plus sur les boutons rouges (voir la section 5.5). Vérifiez l'absence de fuites au niveau des tubes qui sortent des poignées. Si le mécanisme d'inclinaison est difficile à actionner, ne se verrouille pas correctement, ou si vous voyez des fuites provenant des tubes, cessez immédiatement d'utiliser la chaise.
8. Vérifiez l'absence de dommages au niveau des parties moulées souples (garnitures de siège, appuie-tête, accoudoirs, pommeau). Si l'une des pièces est endommagée, elle doit être remplacée.
9. Vérifiez la sangle abdominale et les harnais (le cas échéant) pour détecter tout signe de dommage au niveau de la sangle ou des boucles. Si des dommages sont apparents, remplacez la sangle ou le harnais.



MISE EN GARDE : Si des anomalies ou des dommages sont détectés, CESSEZ immédiatement d'utiliser la chaise.

Si une anomalie est détectée, ou pour réserver une inspection par un technicien de service, veuillez contacter le service client NRS Healthcare : 0345 121 8111 (au Royaume-Uni), ou + 44 (0) 1530 232 292 (de l'étranger). La liste des pièces de rechange figure à la section 8. Le client peut installer lui-même certaines pièces, tandis que d'autres nécessitent des compétences spécialisées.

7.2 Inspection annuelle

Nous recommandons que la chaise Seahorse Plus soit contrôlée chaque année par un technicien qualifié pour garantir un fonctionnement sûr et réparer toute pièce endommagée ou manquante.

7.3 Dépannage

Problème	Action
Les roulettes pivotantes ne tournent pas	Vérifiez que les freins ne sont pas enclenchés (voir la section 5.1).
La chaise ne roule pas bien	Vérifiez que les freins ne sont pas enclenchés (voir la section 5.1). Remplacez la roulette pivotante si elle est défectueuse (voir la liste des pièces de rechange à la section 8).
Les freins ne s'enclenchent pas	Remplacez la roulette pivotante (voir la liste des pièces de rechange à la section 8).
Le siège est bancal / n'est pas sécurisé	Vérifiez que les clips de réglage en hauteur sont en place et placés dans les bons trous (voir la section 5.2).
Les repose-pieds ne sont pas d'aplomb	Vérifiez que les clips de réglage en hauteur sont positionnés dans les bons trous (voir les sections 4.1 et 5.3).
Le siège bascule autour du pivot	Vérifiez que les vis / attaches ne sont pas desserrées / manquantes. Les vérins à gaz peuvent être endommagés. Contactez le service client NRS pour obtenir une pièce de rechange / réparation.
Impossible d'enlever les accoudoirs / appuis antérieurs	Vérifiez que la molette est desserrée avant d'enlever l'accoudoir / l'appui antérieur (voir les sections 4.7 et 6.3).
L'accoudoir / appui antérieur bouge	Vérifiez que la molette est bien serrée à fond (voir les sections 4.7 et 6.3).
L'appuie-tête bouge	Vérifiez que les molettes sont bien serrées à fond (voir la section 5.4).
Le pommeau se détache	Vérifiez que le clip du pommeau est verrouillé en place, et qu'un déclic se fait entendre (voir la section 5.7). Si le clip est endommagé, remplacez le pommeau (voir la liste des pièces de rechange à la section 8).
Le pot se détache	Vérifiez que le loquet du pommeau est bien enclenché dans l'encoche du pot (voir la section 5.8). Si le loquet ne parvient pas à s'enclencher, vérifiez que le pot est enfoncé à fond.
La sangle abdominale se détache	Vérifiez les boucles à l'arrière de la chaise, assurez-vous que les boucles arrière sont bien enfoncées à travers le siège (voir la section 4.6).
Les harnais se détachent	Vérifiez que les comes de verrouillage sont bien fermées. Vérifiez que les boucles arrière sont bien enfoncées à travers le dossier du siège (voir les sections 6.1 et 6.2).

7.4 Nettoyage et désinfection

La chaise doit être nettoyée régulièrement et séchée après chaque utilisation. Le nettoyage de la chaise est l'occasion idéale pour identifier les signes d'usure ou de dommages (voir la section 7.1).

Un nettoyage régulier est également essentiel pour minimiser les risques de transmission d'infections entre les utilisateurs et les soignants. Ceci est particulièrement important dans un environnement multi-utilisateur. Prêtez particulièrement attention au nettoyage de l'interface pot / chaise, ainsi qu'entre les garnitures, le pommeau et le siège moulé.



MISE EN GARDE : Le soignant est exposé au risque de transmission d'infections lors du nettoyage de la chaise. Porter un équipement de protection pendant le nettoyage ou l'entretien.

- Utilisez un chiffon ménager absorbant, propre et non abrasif.
- Le nettoyage se fait avec de l'eau tiède et un détergent neutre.
- Pour la désinfection, nous recommandons une solution d'eau de Javel diluée (hypochlorite de sodium) dans les proportions suivantes : 1 volume d'eau de Javel pour 20 d'eau (0,1 % de chlore disponible ou 1000 parties par million).
- Rincez ensuite à l'eau propre et séchez intégralement après le nettoyage.
- Vérifiez régulièrement les roulettes pivotantes afin d'éliminer les particules de saleté et les peluches qui se sont accumulées.
- N'utilisez pas des nettoyeurs abrasifs ou des solvants qui risqueraient d'endommager la chaise.
- Vérifiez le bon fonctionnement de la chaise après le nettoyage.

7.5 Nettoyage de la sangle abdominale et du harnais

- Nettoyez avec une éponge et de l'eau savonneuse tiède.
- N'utilisez pas de produit javellisant ou de solvants.
- Pas de nettoyage à la vapeur, pas de séchage dans un sèche-linge ou de nettoyage à sec.

8 Pièces de rechange

Une gamme complète de pièces de rechange est disponible pour la chaise Seahorse Plus. Pour les obtenir, veuillez contacter le service client NRS Healthcare : 0345 121 8111 (au Royaume-Uni), ou + 44 (0) 1530 232 292 (de l'étranger). Certaines pièces de rechange doivent être commandées dans une taille spécifique ; veuillez vous assurer d'avoir vérifié le modèle de votre chaise.

CODE D'ARTICLE	DESCRIPTION DES PIÈCES	COMPÉTENCES D'INSTALLATION
N72176	Appuie-tête Seahorse Plus	Client
N72199	Pommeau Seahorse Plus	Client
N72206	Pot Seahorse Plus	Client
N72395	Repose-pieds Seahorse Plus (paire), petit modèle, y compris les brides	Client
N72401	Repose-pieds Seahorse Plus (paire), moyen / grand modèle, y compris les brides	Client
N72218	Jeu de brides pour repose-pieds Seahorse Plus (x 4)	Client
M99369	Roulette pivotante Seahorse Plus (par unité)	Technicien
N72231	Ensemble vérin à gaz et câble Seahorse Plus, petit modèle	Technicien
N72917	Ensemble vérin à gaz et câble Seahorse Plus, moyen / grand modèle	Technicien
N72243	Jeu de clips de réglage en hauteur et de repose-pieds Seahorse Plus	Client
N72371	Jeu d'écrous en T pour volant et appuie-tête Seahorse Plus	Client
N72383	Jeu d'attaches Seahorse Plus (vis, rondelles, clips)	Varie selon la pièce
N72802	Sangle abdominale Seahorse Plus, petite	Client
N72814	Sangle abdominale Seahorse Plus, moyenne	Client
N72826	Sangle abdominale Seahorse Plus, grande	Client
N73211	Accoudoirs Seahorse Plus (paire)	Client



10 Informations générales

Fabricant :

NRS Healthcare

Sherwood House, Cartwright Way, Forest Business Park

Colline de Bardon, Coalville, Leicestershire, LE67 1UB, Royaume-Uni

+ 44 (0) 1530 232 292

www.nrshealthcare.com (site web entreprise)

www.nrshealthcare.co.uk (site web client)

Normes de produit

BS EN 12182 : 2012 (produits d'assistance pour personnes handicapées. Exigences générales et méthodes d'essai)

BS EN ISO 14971:2012 (Application de gestion des risques aux dispositifs médicaux)

