

# garantie limitée de 2 ans

Votre produit de marque Drive est garanti exempt de tout défaut et vice de fabrication pour une durée de 2 ans à partir de la date d'achat.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et soigneusement inspecté avant son emballage. Cette garantie limitée de 2 ans reflète notre confiance dans les matériaux et la fabrication de notre produit. Pour nos clients elle est l'assurance d'un service fiable pour de nombreuses années

Dans l'éventualité d'un défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le matériel défectueux, à notre discrétion.

Cette garantie ne s'applique pas à des problèmes causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou la négligence, et dans les limites d'une usure normale du produit. Elle ne s'étend pas également aux éléments à durée de vie limitée tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à une utilisation fréquente et ont besoin d'être remplacés périodiquement.

Pour toute autre question relative à votre appareil Drive ou cette garantie, voyez avec un revendeur agréé de notre compagnie.

**drive**  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

*Wenzel<sup>ite</sup>Re/hab*

© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

## cadre de marche postérieur nimbo léger

KA 1200N, KA 2200N, KA 3200N, KA 4200N



EU Authorized Representative  
Drive International, LLC  
Globe Lane - Stockport  
DUKINFIELD SK16 4RE, GB


*Wenzel<sup>ite</sup>Re/hab*

www.drivemedical.com

**drive**  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM


## utilisation

1. Retirez le cadre Nimbo de sa boîte.
2. Pour déplier le cadre Nimbo, tirez sur les poignées et les croisillons dans des directions opposées. Dépliez complètement jusqu'à ce que les boutons poussoirs « cliquent » en place.
3. Pour installer les pieds, faites correspondre les numéros sur les pieds avec ceux du cadre. Enfoncez les boutons poussoirs sur les pieds et faites-les glisser dans le cadre. Le pied est verrouillé en place lorsque le bouton « clique » hors du trou d'ajustement sur le cadre.
4. Pour ajuster la hauteur du cadre de marche, enfoncez les boutons poussoirs de chaque pied et faites glisser chaque pied dans le cadre.

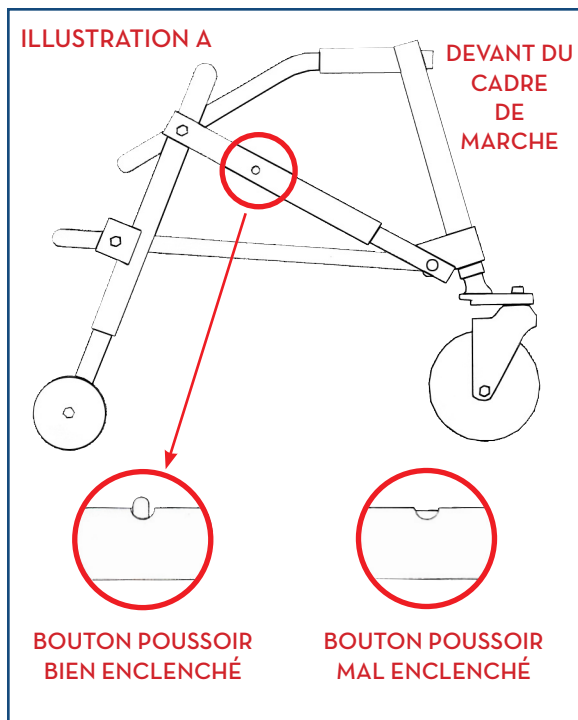


## renseignements

1. Soulevez et placez le bouton (A) pour verrouiller ou déverrouiller les roues.

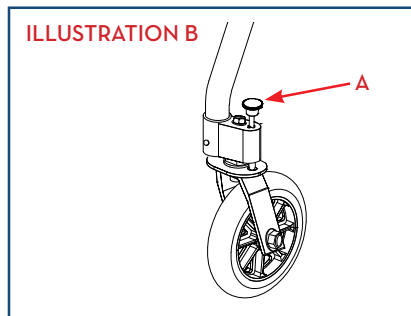

2. Pour replier le cadre Nimbo, installez-vous devant l'ouverture, enfoncez les boutons poussoirs, penchez le cadre de manière à ce qu'il tienne sur ses pattes arrière et poussez les pattes avant vers les pattes arrière.
3. Pour neutraliser le fonctionnement unidirectionnel des roues arrière, soulevez la goupille en aluminium et insérez-la dans le support de neutralisation.

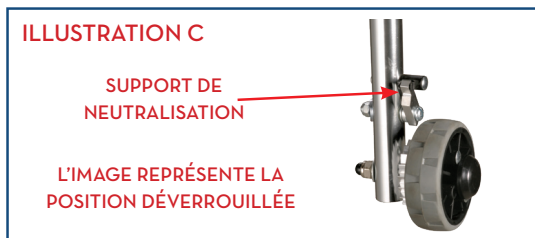

## entretien

1. Inspectez le cadre de marche périodiquement. Serrez les écrous et les boulons lorsque cela est nécessaire. Communiquez avec votre revendeur agréé Drive si votre produit doit être réparé ou si une pièce doit être remplacée.
2. Pour nettoyer le cadre de marche, utilisez de l'eau tiède et un détergent doux. Essuyez le cadre à l'aide d'un chiffon doux et sec.