



# RAMPE ENROULABLE



Les rampes enroulables peuvent être utilisées comme une rampe d'accès fixe ou portable.

Elles sont étudiées pour déambulateurs, fauteuils roulants et scooters. Elles vous permettent de passer des obstacles et des marches plus ou moins grandes en fonction de la longueur choisie.

La résistance maximum de ces rampes est de 300 kg. Elles sont intégralement réalisées en aluminium anti-corrosion.

## Instructions d'utilisation :

- Dérouler la voie principale afin de la mettre à plat.
- Mettre de chaque côté de la voie les 2 glissières en les emboitant dans la voie principale et verrouiller les avec le loquet prévu à cet effet (en dessous de la rampe) afin de solidariser l'ensemble. (NB : les 2 glissières portent une étiquette « Left » pour gauche et « Right » pour droit afin de les positionner du bon côté de la voie).
- Vous pouvez fixer de manière permanente cette rampe à la surface en utilisant les 3 points d'accroche situés en haut de la rampe.
- Pour le rangement de la rampe une fois mise en place, procéder à l'inverse des instructions situées ci-dessus.

Avant utilisation, veuillez à bien vérifier que les loquets sont bien enclenchés et veuillez à stabiliser la rampe sur une surface saine sans défaut et sans risque de glisse (le chemin se situant sur le haut de la rampe doit adhérer et être stable sur la surface de pose).

Durée de garantie : 1 an à compter de la date d'achat.