

**Drive**  
**CONCEPTION & FABRICATION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX**

**Wenzelite Re/hab**

**Chaise de bain Otter**

**Mode d'emploi et Garantie**

**Articles réf.**

**OT 100, OT 200, OT 300**

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

**Utilisation recommandée :**

La Chaise de Bain Otter est destinée à apporter un soutien au cours de la toilette dans une baignoire. L'assise, le dossier et les pieds sont entièrement réglables. Tous les réglages s'effectuent sans outils.

**Assemblage :**

La Chaise de Bain Otter est livrée entièrement assemblée dans un emballage unique. Ce carton contient : la Chaise de bain, une sangle des coussins de tête, deux sangles de positionnement et une paire de sangles pour les jambes.

Si le colis est incomplet, veuillez contacter un revendeur agréé Drive.

**Accessoire en option :** Support de bain, article réf. OT 8010

**Entretien et nettoyage :**

1. Vérifier la chaise périodiquement afin de s'assurer de l'absence de craquelures, de cassures, de parties lâches ou manquantes ou de dysfonctionnements. Vérifier l'absence de déchirures ou d'usures excessives sur le tissu. Si une réparation du produit ou le remplacement de pièces est nécessaire, contacter un revendeur agréé Drive.

2. Laver le cadre et le tissu à l'eau savonneuse ou avec une solution d'eau de javel à 10 %. Ne pas utiliser de produits nettoyants à l'huile de pin. Le tissu et les sangles peuvent être enlevés et lavés en machine. Avant le lavage, fermer les bandes velcro. La housse en tissu peut être lavée en machine à l'eau froide et égouttée. Les sangles peuvent être lavées à l'eau tiède et séchées en machine à froid. Ne pas repasser.

**Réglages : (Voir Figure 1)**

1. L'angle de l'assise est réglé en utilisant les deux leviers (B). Tirer sur les leviers, placer l'assise dans la position souhaitée et libérer les leviers. L'angle du dossier est réglé en utilisant les deux leviers (C).

2. La hauteur de la sangle des coussins de tête peut être réglée en ouvrant la sangle par l'arrière et en la plaçant à la hauteur souhaitée. Bien fermer la bande velcro de la sangle une fois celle-ci mise en place. Faire coulisser les coussins de tête (A) le long de la sangle pour régler la largeur.

3. Si nécessaire, les sangles (D) peuvent être réglées en les insérant à la hauteur souhaitée tout le long du siège.

4. Pour régler les pieds (E), tirer sur la barre transversale (F) vers l'extérieur, faire tourner les pieds et remettre la barre transversale en place pour les verrouiller.

#### **Avertissement :**

La supervision d'un adulte est requise en permanence.

Les sangles et les supports doivent être réglés avec soin pour assurer le confort et la sécurité de l'enfant.

L'enfant doit être attaché à tout moment lorsqu'il est assis sur le siège.

#### **GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS**

Votre produit de marque Drive est garanti exempt de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat.

Ce dispositif a été fabriqué dans le respect de normes rigoureuses et a été contrôlé avec soin avant son expédition. La présente Garantie Limitée de Deux Ans traduit la confiance que nous plaçons dans les matériaux et la fabrication de nos produits.

En cas de vice couvert par la présente garantie, nous choisirons, à notre discrétion, de réparer ou de remplacer le dispositif.

La présente garantie ne couvre pas une défaillance du dispositif due à un usage indu ou à une négligence de l'utilisateur, ou résultant d'une usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables qui subissent une usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez des questions concernant votre dispositif Drive ou la présente garantie, veuillez contacter un revendeur agréé Drive.

Wenzelite Re/hab

Drive

CONCEPTION & FABRICATION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

PORT WASHINGTON, NY 11050

© 2002 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque déposée de Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 Etats-Unis. Fabriqué en Chine