



LombaStart

Ceinture de soutien lombaire

Propriétés :

- Quatre baleines anatomiques sur la partie dorsale.
- Deux baleines souples sur la partie abdominale.
- Sangle additionnelle permettant d'adapter le niveau de contention dorsal.

Indications :

- Traitement des lombalgies communes.
- Traitement symptomatique d'appoint des lombalgies secondaires.

Contre-indications :

Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.

Effets secondaires :

Pas d'effet secondaire connu dans le cadre d'une utilisation correcte.

Conseils de pose :

- Décrocher les sangles auto agrippantes latérales.
- Demander à votre professionnel de santé de conformer les baleines à la forme du dos avant la première utilisation.
- Revêtir la ceinture, passe-main situé à droite.
- À l'aide du passe-main, fermer la patte auto-agrippant ventrale en ajustant à la contention désirée.
- Ajuster le maintien dorsal en fixant sur le devant la sangle additionnelle latérale.

Précautions :

Suivre les conseils du professionnel de santé qui a prescrit ou délivré le produit. En cas d'inconfort, consulter ce professionnel de santé. Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine. Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas réutiliser le produit pour un autre patient.

Entretien :

- Voir étiquette produit.
- Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés).
- Essorer par pression.
- Sécher loin d'une source de chaleur.
- Fermer les auto-agrippants avant lavage.

Composition :

Voir étiquette produit.