

PAIRE D'AMPLIFICATEURS D'ECOUTE RECHARGEABLES

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver.

Les amplificateurs d'écoute (référence 25524) ont été conçus pour amplifier les sons et apporter plus de confort auditif.

Caractéristiques techniques et conditions d'utilisation :

- Amplificateur d'écoute: gain + 40dB pour sortie audio max 124 dB.
- Plage de fréquence : 300-4000 Hz. Distorsion harmonique : $\leq 5\%$.
- Modèle contour d'oreille.
- Volume sonore réglable.
- Livrés avec embouts de tailles différentes et un coffret pour le rangement et le transport.
- Alimentation : socle rechargeable USB pour batterie rechargeable 1.2 V 3.5 mA NiMH. Livré avec un adaptateur pour prise secteur.

ATTENTION : Les amplificateurs d'écoute ne sont pas des dispositifs médicaux. Utiliser de façon temporaire et occasionnelle. Les amplificateurs ne sont pas conçus pour une utilisation permanente. Ne pas utiliser l'amplificateur d'écoute en cas d'inflammation ou infection de l'oreille ou du conduit auditif, de problème auditif, de gêne ou d'allergie lors de l'utilisation du produit. Ne pas utiliser l'amplificateur d'écoute à proximité de champs électromagnétiques, de rayons ou d'ondes radio. Ne pas utiliser le produit près des sources de chaleur et d'humidité.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Fig.1 :



Installation et réglages :

Sortir le produit de l'emballage et suivre les instructions.

1. Charger complètement les amplificateurs avant toute utilisation. Le temps de charge nécessaire peut être jusqu'à huit heures. Les deux amplificateurs peuvent être rechargés simultanément. L'autonomie de chaque amplificateur varie selon l'utilisation et l'intensité du volume (autonomie jusqu'à 15 heures en utilisation continue et volume maximum).

Placer les amplificateurs en position OFF (position O).

Placer les amplificateurs sur le socle de recharge comme indiqué (Fig.1). Puis insérer la prise USB directement dans un port de charge USB (ordinateur...) ou dans l'adaptateur (fourni) et relier ce dernier à une prise secteur.

Les LED situées à l'arrière du socle de recharge indiquent l'état de charge des amplificateurs. Les LED rouges indiquent que les amplificateurs sont déchargés. Les LED vertes indiquent que les amplificateurs sont chargés.

2. Lorsque les amplificateurs sont complètement chargés, ôter ces derniers du socle. Choisir l'embout adapté à l'oreille et le positionner sur l'amplificateur.
3. Faire glisser la molette de réglage du volume sonore au niveau minimum et allumer l'amplificateur en position ON (position I). Puis placer correctement et délicatement l'amplificateur à chaque oreille. Régler le volume si nécessaire.
4. Eteindre les amplificateurs (position O) en cas de non utilisation.

Attention : Ne pas insérer les embouts trop profonds dans l'oreille. En cas de gêne ou de sifflement, essayer avec un embout de taille différente. Ne pas laisser le socle de charge relié à un port USB lorsque les amplificateurs ne sont pas en charge.

Lorsque l'amplificateur faiblit et le son diminue, recharger les amplificateurs.

Conditions d'utilisation et sécurité :

Utiliser les amplificateurs d'écoute pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

Résolutions des problèmes rencontrés :

<u>Défauts constatés</u>	<u>Solutions / comment résoudre le pb</u>
Les LED du socle de recharge ne s'allument pas. Les amplificateurs ne chargent pas.	Vérifier que le port de charge USB utilisé (ordinateur...) est allumé. Vérifier que la prise de courant fonctionne si l'adaptateur est utilisé.
L'amplificateur ne fonctionne pas.	Vérifier que les amplificateurs sont complètement chargés. Vérifier que l'amplificateur est allumé (position I). Modifier le volume. Changer le format de l'embout. S'assurer que le champ du micro est dégagé. S'assurer que l'embout est correctement inséré et que l'amplificateur est correctement placé.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.

