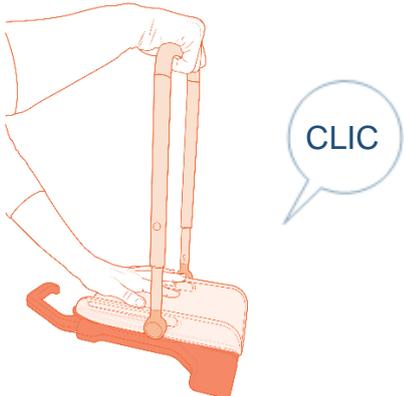
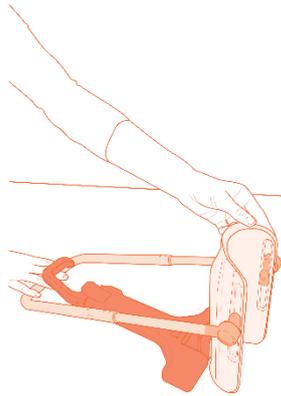
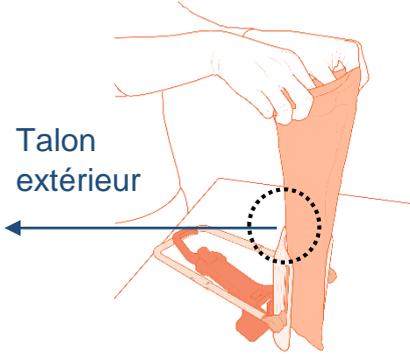
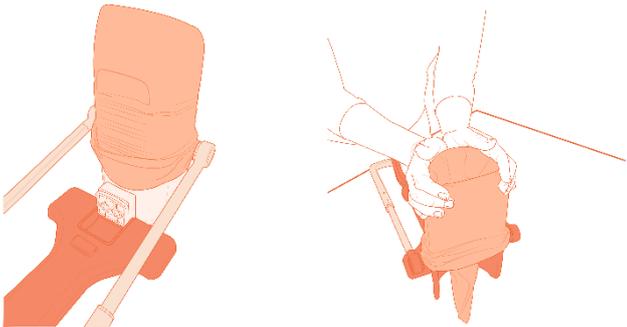


NOTICE D'UTILISATION


L'enfile bas de contention Stockeez est un produit breveté unique, conçu pour faciliter l'habillement des bas de contention en toute autonomie.

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver.

Sortir le produit et suivre les étapes d'installation.


<p style="text-align: center;">1</p>  <p>Placer le Stockeez sur une surface stable. Avec une main, déployer et tirer la poignée en position verticale jusqu'au « clic » en maintenant la base avec l'autre main.</p>	<p style="text-align: center;">2</p>  <p>Rabattre la poignée vers l'utilisateur puis relever la partie blanche du Stockeez en position verticale en maintenant la base avec l'autre main.</p>
<p style="text-align: center;">3</p>  <p>Mettre le bas de contention en position verticale dans la partie incurvée : l'ouverture du bas de contention orientée vers le haut et le talon du bas de contention doit être orienté vers l'utilisateur.</p>	<p style="text-align: center;">4</p>  <p>Placer le bas de contention sur le Stockeez et faire glisser jusqu'aux deux extrémités de la poignée.</p> <p>Continuer de faire glisser le bas de contention jusqu'à l'apparition du bord de l'intérieur du talon vers le haut du Stockeez.</p>

5

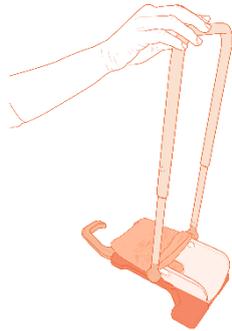

Relever la poignée en position verticale puis baisser la partie blanche du Stockeez.


6

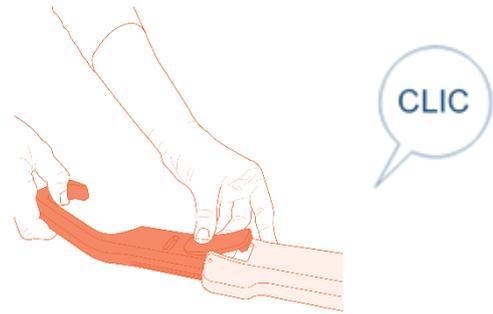

Appuyer simultanément sur la languette et tirer l'accroche afin de régler la longueur du pied extensible. Cela permet d'ajuster la longueur selon la taille et les besoins de l'utilisateur.

S'asseoir sur une chaise.

7

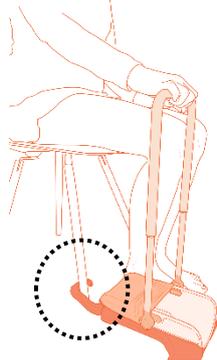

Prendre le Stockeez avec la poignée et placer l'accroche du pied extensible derrière le pied avant de la chaise.

Poser le Stockeez sur le sol. Réajuster le pied extensible si nécessaire.

8



Faire pivoter la partie blanche du Stockeez vers l'extérieur du pied. Puis positionner le pied et le faire glisser dans le bas de contention jusqu'à ce que le talon du pied soit sur le bord de la partie avant du Stockeez.


9



Tout en maintenant la poignée, lever légèrement la jambe afin de faire basculer la partie blanche du Stockeez vers l'avant dans une position inclinée.

Puis pousser le talon vers l'avant et les orteils vers le haut.

10

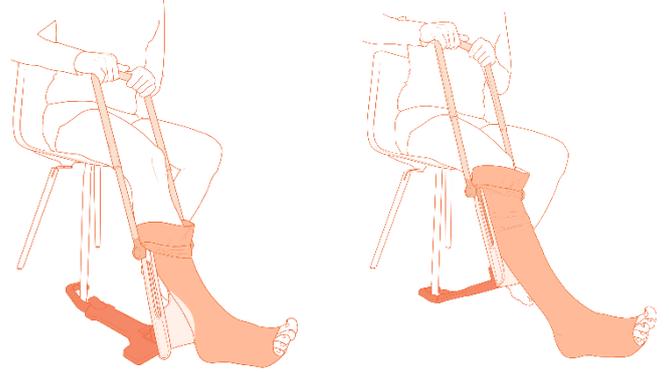

Enfin, tirer la poignée pour remonter le bas de contention.

Dans le cas d'utilisation de collants plus longs, finaliser en tirant le bas de contention vers le haut de la jambe.

Habiller l'autre pied en répétant les étapes.

Replacer le Stockeez sur une surface stable et appuyer sur les deux boutons presseurs situés de chaque côté pour replacer la poignée en position initiale. Puis faire glisser la poignée vers le bas.

La vidéo d'utilisation du produit est également disponible sur le lien :

<https://www.youtube.com/watch?v=eauQ27GGDLM>

Le Stockeez est une aide à l'habillement pour mettre facilement les bas de contention. Il est important de respecter les différentes étapes d'utilisation. Après quelques essais, l'utilisateur maîtrisera parfaitement son utilisation.

Attention :

Utiliser uniquement des bas de contention secs et non mouillés ou humides.

Utiliser le Stockeez pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.