

## 540286 Montage



### Éléments :

- 1 assise pivotante
- 1 dossier
- 2 supports latéraux



### Étape 1 :

Placer un support latéral en face des tubes présent sous l'assise, appuyer sur les tétons de réglage (présents sur le support latéral) puis coulisser le support latéral jusqu'à la 1<sup>ère</sup> position. Vérifier que les 2 cotés sont correctement verrouillés.



### Étape 2 :

Refaire la procédure précédente pour l'autre coté.



### Étape 3 :

Prendre le dossier, le placer devant les tubes à l'arrière de l'assise, **appuyer sur les tétons** (présent sur le dossier) et faire coulisser le dossier jusqu'à ce qu'il soit correctement **verrouiller** des 2 cotés.



### Étape 4 :


Poser le siège sur la baignoire et régler la largeur des supports latéraux pour que les supports soient correctement appliqués sur la baignoire.

Effectuer le réglage (**3 positions** possible) en **appuyant sur le téton** et en coulisissant le support.

La position de réglage doit être identique des 2 cotés du siège.

### Utilisation :

Rotation du siège en **appuyant sur la manette rouge**.

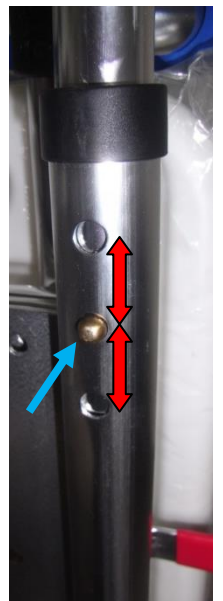

Relevage des accoudoirs en **appuyant sur le bouton rouge** de déverrouillage.

