

garantie limitée de 3 ans

Votre produit de marque Drive est garanti exempt de tout défaut et vice de fabrication pour une durée de 3 ans à partir de la date d'achat.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et soigneusement inspecté avant son emballage. Cette garantie limitée de 3 ans reflète notre confiance dans les matériaux et la fabrication de notre produit. Pour nos clients elle est l'assurance d'un service fiable pour de nombreuses années

Dans l'éventualité d'un défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le matériel défectueux, à notre discrétion.

Cette garantie ne s'applique pas à des problèmes causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou la négligence, et dans les limites d'une usure normale du produit. Elle ne s'étend pas également aux éléments à durée de vie limitée tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à une utilisation fréquente et ont besoin d'être remplacés périodiquement.

Pour toute autre question relative à votre appareil Drive ou cette garantie, voyez avec un revendeur agréé de notre compagnie.

drive
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

Wenzel^{ite}Re/hab

© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

siège
article KA 1285

pour les cadres nimbo et tyke
(article KA 1200)



EU Authorized Representative
Drive International, LLC
Globe Lane - Stockport
DUKINFIELD SK16 4RE, GB

Wenzel^{ite}Re/hab

www.drivemedical.com

drive
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

installation

1. Retirez les boulons (A).
2. Drop outside frame connecting tube (B)
3. Relevez le segment horizontal en « U » (E).
4. Faites glisser les supports de montage du siège (C) sur le segment horizontal en « U » et poussez vers l'arrière.
5. Serrez les boutons (D) sous les supports de montage du siège.
6. Réinstallez les boulons (A).

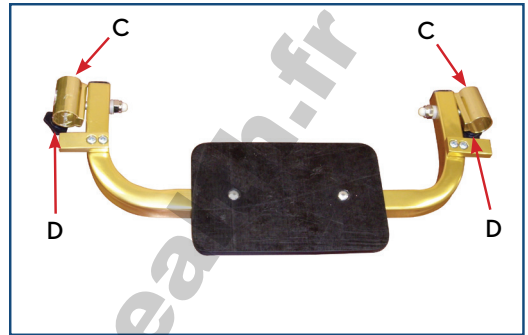


illustration 2

utilisation

Repliez le siège vers le haut pour une utilisation debout et déployez-le pour une utilisation en position assise ou pour le repos. Vous devez relever le siège pour replier le cadre de marche.

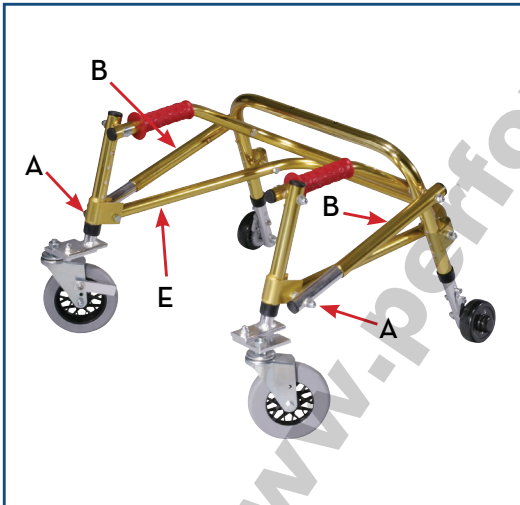


illustration 1



illustration 3