

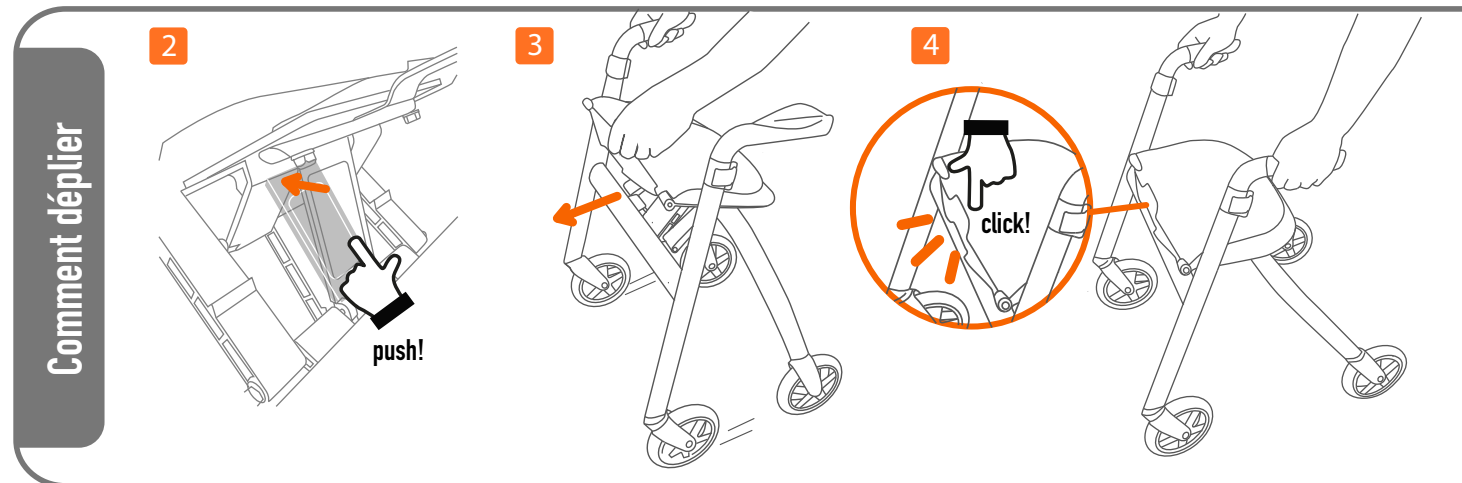


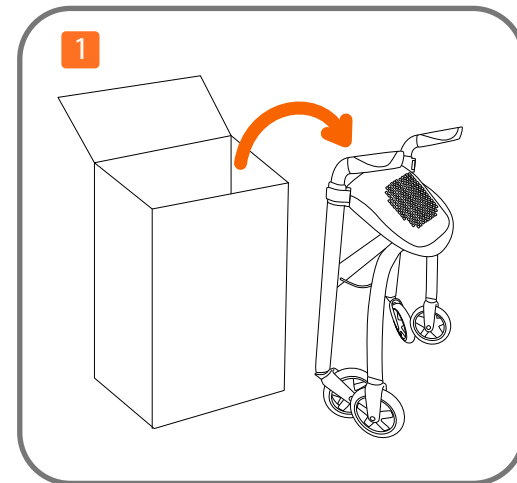


2 Poussez la pagaie sous le siège
3 Tournez les roues vers l'avant
4 appuyez sur le siège pour verrouiller le cadre (vous entendrez des « clics »)


⚠ S'il vous plaît assurez-vous que le Nip-glide soit complètement ouvert avant utilisation

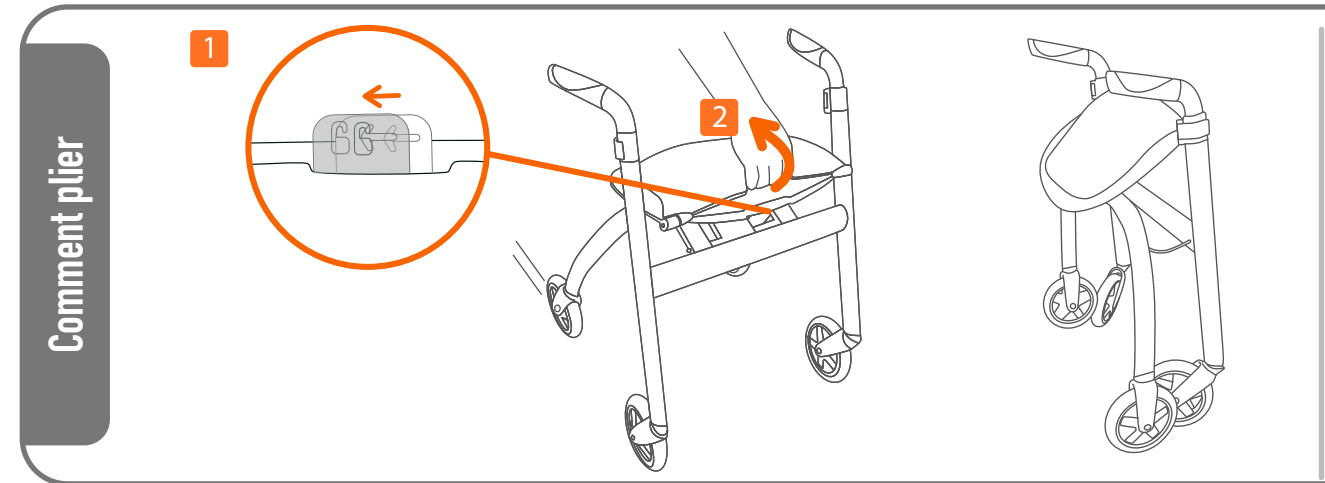

1 2 Relâchez le verrouillage automatique en poussant le loquet vers la gauche et maintenez-le, puis soulevez le siège

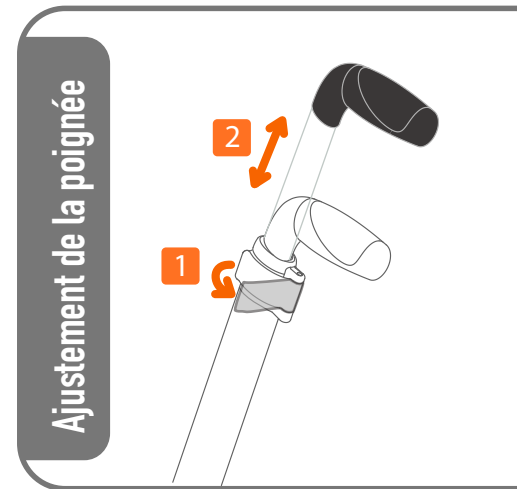


1 Ouvrez le clip
2 Ajustez la hauteur de la poignée
3 Et fermez le clip

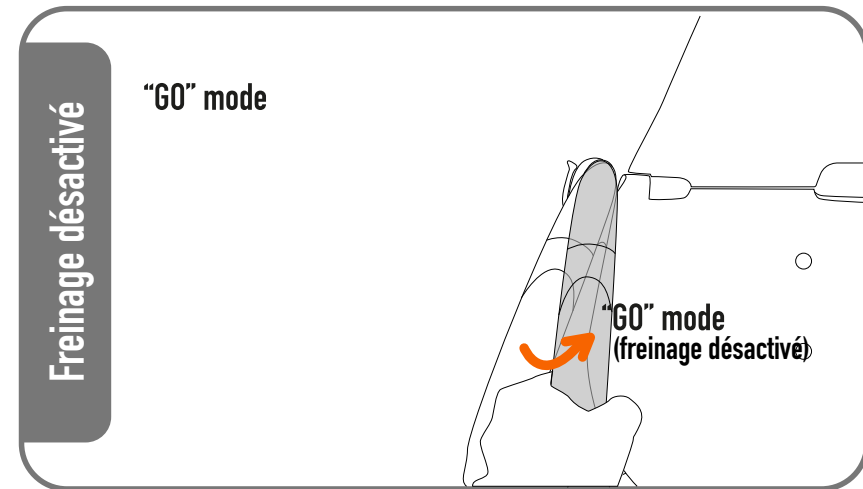

Restez en mode "Go"


1 Pousser vers l'intérieur la poignée (mode aller)
2 et appuyez sur le levier pour verrouiller la poignée en place

* lorsque le levier est abaissé, la hauteur de la main n'est pas réglable

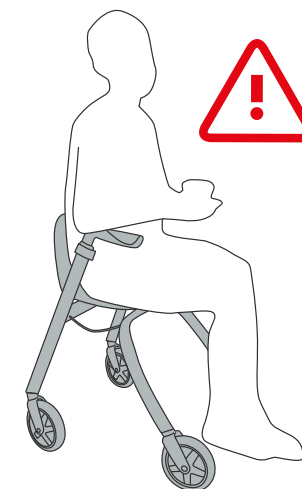

L'avertissement **ACTIVEZ LE FREINAGE (PAS de mode "GO")**



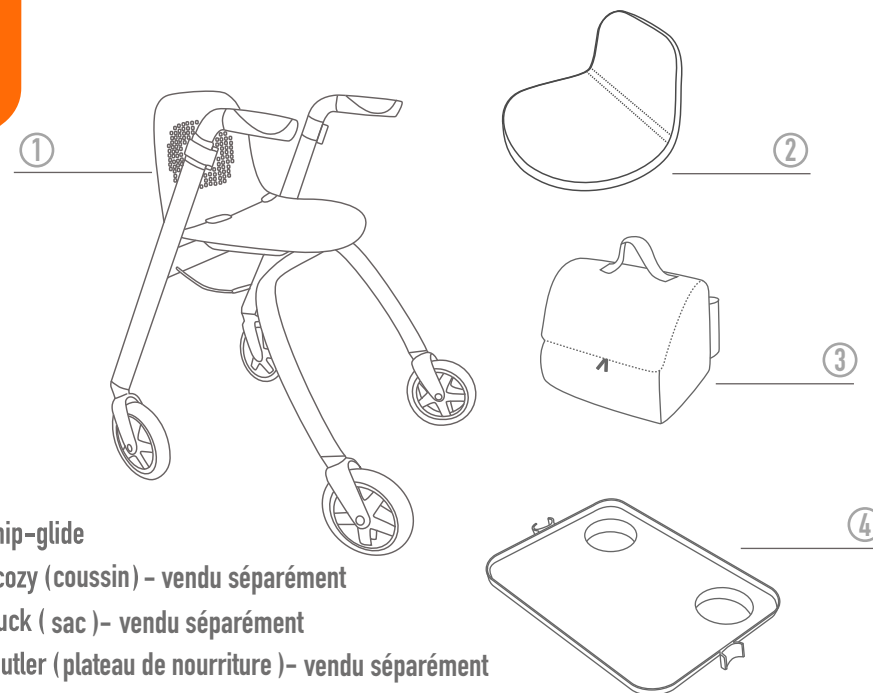

- ① votre nip-glide
- ② votre cozy (coussin) – vendu séparément
- ③ votre tuck (sac)– vendu séparément
- ④ votre butler (plateau de nourriture)– vendu séparément



NIP can take Maximum Weight 125kg/265lbs
 NIP handle height can be adjustable 74~93cm/30~37"
 Recommended height of user is 150~185cm/4.9~6ft
 NIP Max turning distance is 85cm/33.5" diameter

⚠ Attention

S'il vous plaît n'utilisez pas le Nip-glide à d'autres fins telles qu'une aide à la marche (ce n'est PAS un fauteuil roulant)

N'accrochez rien aux poignées ou au cadre.

N'utilisez pas le siège sans le dossier en place.

Il est recommandé de consulter votre médecin, physiothérapeute ou ergothérapeute en ce qui concerne votre aptitude à opérer le nip-glide correctement

La charge maximum pour TUCK (SAC) est de 5kg. Si vous dépassez le poids maximum, vous pourrez vous mettre en danger lors de l'utilisation de nip-glide.

♥ Entretien


Vérifiez régulièrement que les vis (zone du siège) sont bien serrées.

Assurez-vous que votre frein fonctionne bien. En cas de signes d'usure des freins, veuillez contacter le centre de service.


Gardez les roues propres et remplacez les roues si elles sont usées ou endommagées

Instruction d'entretien pour Tuck et Cosy


Laver à la main à l'eau tiède / Bien rincer / Ne pas mettre au sèche-linge / Ne pas repasser
 / Ne pas blanchir / Ne pas nettoyer à sec / Sécher à l'abri de la lumière directe du soleil
 / Ne pas utiliser de détergent

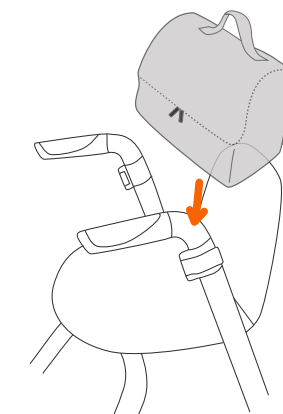

Position recommandée pour le Tuck (SAC)

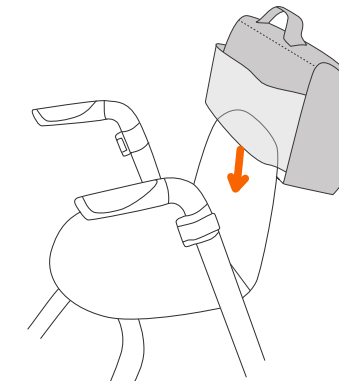

Le Tuck peut être placé à l'extérieur du siège lorsque l'utilisateur est assis.
 (IL NE DOIT PAS EXCÉDER UN MAX POIDS de 5 kg)

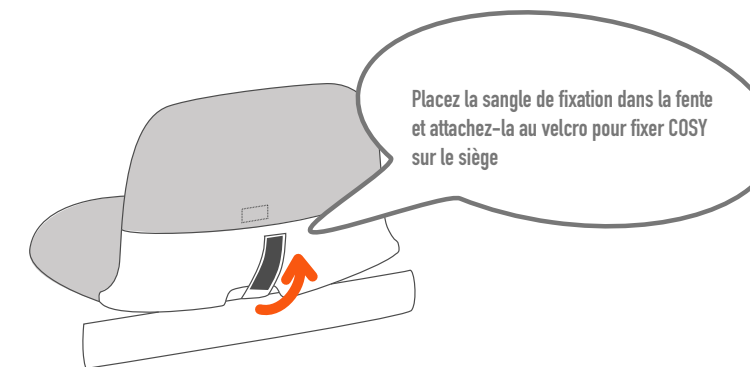

Placez la sangle de fixation dans la fente et attachez-la au velcro pour fixer COSY sur le siège

nip-glide™ Manuel d'instruction

Veuillez lire ces instructions avant utilisation pour votre sécurité