

garantie limitée de 2 ans

Votre produit de marque Drive est garanti exempt de tout défaut et vice de fabrication pour une durée de 2 ans à partir de la date d'achat.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et soigneusement inspecté avant son emballage. Cette garantie limitée de 2 ans reflète notre confiance dans les matériaux et la fabrication de notre produit. Pour nos clients elle est l'assurance d'un service fiable pour de nombreuses années.

Dans l'éventualité d'un défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le matériel défectueux, à notre discrétion.

Cette garantie ne s'applique pas à des problèmes causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou la négligence, et dans les limites d'une usure normale du produit. Elle ne s'étend pas également aux éléments à durée de vie limitée tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à une utilisation fréquente et ont besoin d'être remplacés périodiquement.

Pour toute autre question relative à votre appareil Drive ou cette garantie, voyez avec un revendeur agréé de notre compagnie.

drive
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

chaise de baignoire otter

OT 1000, OT 2000, OT 3000

Wenzel^Yte Re/hab

www.drivemedical.com

drive
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

Wenzel^Yte Re/hab

www.drivemedical.com

drive
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

utilisation recommandée

La chaise de baignoire Otter fournit le soutien nécessaire pour les soins dans la baignoire. Le siège, le dossier et les pieds sont tous ajustables. Tous les ajustements se font sans outils.

assemblage

La chaise de baignoire Otter est livrée complètement assemblée dans sa boîte. Cette boîte contient : la chaise de baignoire, la courroie de l'appui-tête, les courroies de maintien et des jambes.

Si votre ensemble est incomplet, veuillez communiquer avec votre revendeur Drive.

Accessoires optionnels:

Support pour la baignoire : Article no. OT 8010

Support pour la douche : Article no. OT 8020

Ensemble confort (tissus) pour OT 1000 : Article no. OT 1002

Ensemble confort (tissus) pour OT 2000 : Article no. OT 2002

Ensemble confort (tissus) pour OT 3000 : Article no. OT 3002

entretien

1. Examinez périodiquement la chaise pour y déceler la présence de craquelures, de pièces manquantes, lâches ou non fonctionnelles. Vérifiez la présence de déchirures ou d'usure sur le recouvrement. Communiquez avec votre revendeur agréé Drive si votre produit doit être réparé ou si une pièce doit être remplacée.
2. Lavez la chaise et le revêtement à l'aide d'eau savonneuse ou d'une solution de 10 % de produit de blanchiment. N'utilisez pas de nettoyants à l'huile de pin. Le recouvrement et les courroies peuvent être retirés et lavés à la machine. Raccordez les bandes Velcro™ ensemble avant le lavage. Les recouvrements en tissus peuvent être lavés à l'eau froide et séchés par égouttement. Les courroies peuvent être lavées à l'eau tiède et séchées à basse température. Ne pas repasser.

précautions

La supervision d'un adulte est requise en tout temps. Les courroies et les supports doivent être ajustés avec soin pour assurer le confort et la sécurité de l'enfant. Les courroies doivent être utilisées en tout temps.

ajustements

Voir illustration 1

1. Pour ajuster l'appui-tête, détachez la courroie à l'arrière et ajustez l'appui-tête à la hauteur désirée. Fixez bien la bande Velcro™ lorsque l'ajustement est adéquat. Faites glisser les coussins de l'appui-tête (A) sur la courroie pour ajuster leur écart.
2. Les courroies (D) peuvent être ajustées en les insérant dans n'importe quelle passe tout au long de la chaise.
3. Pour ajuster les pieds (E), tirez les entretoises (F) vers l'extérieur, faites pivoter les pieds et enfoncez-les pour les enclencher.
4. Pour ajuster l'angle du siège, tirez sur l'Uni-Bar sous le siège (ill. 2), faites pivoter le siège à la position désirée et relâchez l'Uni-Bar. Pour ajuster l'angle du dossier, utilisez l'Uni-Bar situé derrière le dossier (ill. 3).



illustration 2

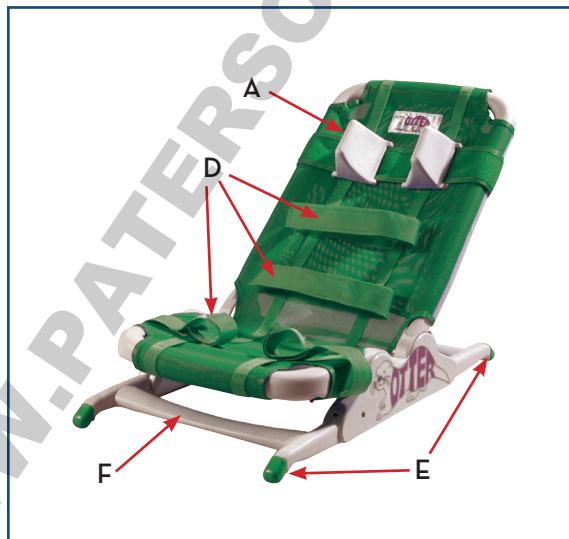


illustration 1



illustration 3