NOTICE D'UTILISATION


L'enfile chaussette Sockee est un produit breveté unique, conçu pour faciliter l'habillement des chaussettes et des bas fins en toute autonomie. Ses accessoires permettent également de se chausser et d'enlever le chaussant.

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver.


Sortir le produit et les accessoires de l'emballage. Le kit est livré avec un enfile chaussette, une poignée et un chausse-pied amovibles.




Placer le Sockee sur une surface stable. Insérer l'embout de la poignée à l'emplacement prévu jusqu'au « clic ». Ne pas appuyer sur le bouton.

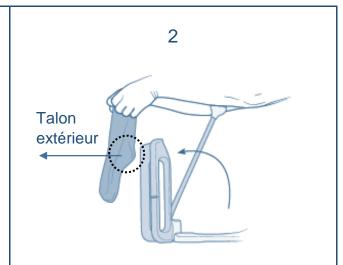

Relever la partie blanche du Sockee en position verticale. La poignée orientée vers l'utilisateur. Mettre la chaussette en position. Attention : le talon de la chaussette doit être orienté vers l'utilisateur.

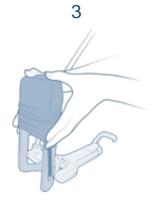

Placer la chaussette sur le Sockee et faire glisser jusqu'aux deux éléments de repère latéraux. Ainsi c'est la partie intérieure de la chaussette qui apparaît.

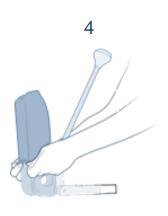

Continuer de faire glisser la chaussette jusqu'à l'apparition du bord de l'intérieur du talon de la chaussette vers le haut du Sockee.



Appuyer simultanément sur la languette et tirer l'accroche afin de régler la longueur du pied extensible. Cela permet d'ajuster la longueur selon la taille et les besoins de l'utilisateur.



Baisser la partie blanche du Sockee en position horizontale et saisir la poignée. S'asseoir sur une chaise.




Placer l'accroche du pied extensible derrière le pied avant de la chaise et poser le Sockee sur le sol. Réajuster le pied extensible si nécessaire.



Faire pivoter la partie blanche du Sockee vers l'extérieur du pied. Puis positionner le pied et le faire glisser dans la chaussette en maintenant la poignée jusqu'à ce que le talon du pied soit sur le bord de la partie avant du Sockee.



Tout en maintenant la poignée, lever légèrement la jambe afin de faire basculer la partie blanche du Sockee vers une position verticale.

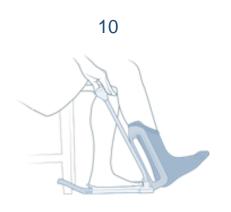

Enfin, pousser le talon vers l'avant et les orteils vers le haut pour finaliser l'habillement. Dans le cas d'utilisation de chaussettes plus longues, finaliser en tirant la chaussette vers le haut de la jambe.


Habiller l'autre pied en répétant les étapes.

La vidéo d'utilisation du produit est également disponible sur le lien :

https://www.youtube.com/watch?v=nAvhsEVe6LI.

Pour parfaire l'aide à l'habillement, le kit Sockee permet de mettre les chaussures et retirer facilement les chaussettes ultérieurement sans se baisser.

Pour se chausser :

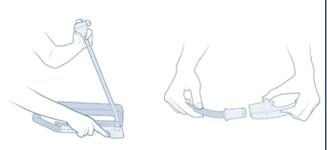

Appuyer sur le bouton situé sous la poignée pour libérer cette dernière. Insérer l'embout de la poignée dans le chausse-pied fourni jusqu'au « clic » en respectant le bon sens d'insertion.

En position assis, utiliser le chausse-pied pour mettre les chaussures.

Pour se déchausser





Pour ôter les chaussettes, glisser le chausse-pied à l'intérieur de la chaussette et pousser vers le bas.

Appuyer sur le bouton situé sous le chausse-pied pour libérer la poignée.

Le Sockee est une aide à l'habillement pour chausser et ôter plus facilement chaussettes et bas fins. Il est important de respecter les différentes étapes d'utilisation. Après quelques essais, l'utilisateur maîtrisera parfaitement son utilisation.

Attention:

Le Sockee n'est pas adapté à l'utilisation de bas de contention.

La matière des chaussettes utilisées peut influencer la facilité d'insertion (le coton et la laine seront plus faciles que le nylon).

Utiliser uniquement des chaussettes ou des bas secs et non mouillés ou humides. Utiliser le Sockee pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.