



Canne Siège Pliable



VP159A

Notice d'Utilisation et d'Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté la canne/siège pliable Aidapt. Ce produit est fabriqué avec les meilleurs matériaux et composants disponibles. Si vous l'utilisez correctement, ce produit vous rendra service pendant de nombreuses années.

Veillez noter : Consultez toujours votre prescripteur/physiothérapeute si vous avez un doute concernant la pertinence du produit pour votre utilisation.

NB: L'adéquation de ce matériel doit être évaluée par une personne compétente avant utilisation.

Poids limite 100kg

Ne dépassez pas le poids limité indiqué-cela ferait prendre des risques inutiles à l'utilisateur.

AVANT UTILISATION

Déballer soigneusement le produit. Evitez l'utilisation de couteaux ou autres outils tranchants car cela pourrait endommager la surface du produit.

Si vous constatez que le produit est endommagé ou comporte un défaut, ne l'utilisez pas et contactez votre revendeur.

PLIER & DEPLIER LA CANNE/SIEGE

- Déplier la canne/siège en attrapant le bas du siège et en tirant jusqu'à la butée, jusqu'à ce que le siège soit parallèle au sol.
- Pour plier le siège afin de l'utiliser comme canne d'aide à la marche ou pour le ranger, poussez l'avant du siège vers l'axe central de la canne, dans la continuité de la poignée en vous assurant que le fermoir monté à l'arrière des cliquets de sécurité se place bien autour de l'axe central.

NB: N'essayez pas d'utiliser le produit comme canne d'aide à la marche quand le siège est déplié.

CONSEILS D'UTILISATION

Quand vous êtes assis sur le siège avec la poignée dans le dos, ne mettez pas tout votre poids sur la poignée car cela pourrait faire basculer le siège et par conséquent vous faire tomber. Certains utilisateurs trouvent que le siège est plus stable quand la poignée est placée devant.

NB : Ce produit n'est pas un jouet : ne laissez pas les enfants l'utiliser ni grimper dessus.

NETTOYAGE

Nettoyez votre canne/siège avec un produit de nettoyage non abrasif ou un détergent doux et un chiffon doux. Les détergents abrasifs comme Ajax par exemple et les éponges à grattoir abrasif abîmeraient sérieusement votre produit. Essayez bien votre canne/siège.

REUTILISATION

Si vous n'avez pas utilisé ce produit pendant longtemps, vérifiez toujours qu'il est en bon état avant de le réutiliser. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

SOIN & ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement l'état de votre canne/siège et entretenez-le correctement.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations contenues dans ce livret d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un contrat ou un engagement quelconque par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses représentants ou ses filiales et aucune garantie concernant l'information n'est donnée.

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lorsque vous utilisez ce produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter et être conscient de votre responsabilité pour votre sécurité lorsque vous utilisez ce produit.