




Modèle Breveté
INNOVATION
DE CIZETA

Code ACL : 34010 5149988 6 - Taille : UNIQUE

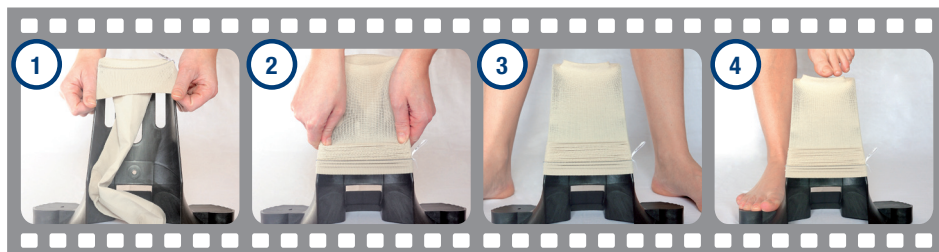


1 Présenter le bas, talon face à l'enfile bas pointe vers le bas

2 Enfiler le bas ou mi-bas jusqu'à la couture du talon

3 Poser l'enfile bas au sol

4 Maintenir l'enfile bas avec le pied opposé

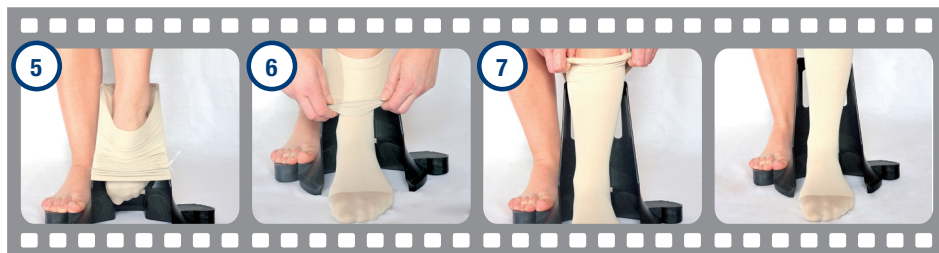

5 Glisser la pointe du pied à l'intérieur du bas ou mi-bas au maximum

6 Retirer le pied de l'enfile bas

7 Remonter le bas ou le mi-bas sur le mollet ou la cuisse

AVEC VARITEC IL EST DÉSORMAIS FACILE D'ENFILER LES BAS DE COMPRESSION MÉDICALE.

La compression médicale est la seule thérapie reconnue contre l'insuffisance veineuse chronique. Néanmoins les difficultés d'enfilage pour des patients obèses, âgés, épuisés, peu mobiles, arthrosiques qui ont du mal à se baisser peuvent limiter la bonne observance du traitement.

En effet une étude médicale montre que :

- 52,8% des patients présentent au moins un facteur susceptible de limiter l'enfilage des bas médicaux de compression
 - La mobilité réduite : 39,8%
 - L'insuffisance cardiaque/respiratoire : 36,8%
 - L'âge supérieur à 70 ans : 35,6 %

Les aides à l'enfilage des bas médicaux de compression représentent donc un des éléments important au bon déroulement du traitement compressif.

C'est pourquoi CIZETA MEDICAL I a porté toute son attention sur la conception d'un modèle breveté d'enfile bas qui réunit les caractéristiques suivantes :

- Léger
- Simple d'utilisation
- Pratique
- Permet un enfilage sans effort