

Siège de bain à lattes Savanah

Savanah

Nouveau code	Ancien code	Hauteur	Poids
09 107 2867	AA1155A	152 mm	2,2 kg
09 107 2875	AA1155B	203 mm	2,5 kg
09 107 2883	AA1155C	305 mm	3,2 kg

Poids maximum de l'utilisateur 190 kg

Utilisation

Le Siège de bain à lattes Savanah est conçu pour surélever la position assise dans la baignoire, facilitant ainsi l'entrée et la sortie du bain. Il peut être utilisé en complément avec une planche de bain ou dans une douche.

Attention

- Le siège de bain ne doit pas être utilisé pour supporter plus de 190 kg.
- Ne pas se tenir debout sur le siège.
- Avant installation, s'assurer que les surfaces de la baignoire et des ventouses sont entièrement propres, sèches et exemptes de tous résidus d'huile de bain, de mousse et de savon.
- Toujours s'assurer que les ventouses sont bien fixées à la partie plane au fond de la baignoire avant de prendre un bain.

Installation

- Placer simplement le siège sur la partie plane de la baignoire dans la position requise et appuyer fermement sur le siège pour fixer solidement les ventouses.
- Les lattes doivent être parallèles à la largeur de la baignoire.
- Garantir que toutes les ventouses sont correctement fixées à la surface plane de la baignoire avant de prendre un bain.
- Pour enlever le siège de la baignoire, défaire les pattes des ventouses de chaque pied avant de soulever le siège. Il est plus facile d'incliner le siège lorsque deux ventouses ont été décollées pour éviter qu'elles se fixent à nouveau.

Spécifications

- Fabriqué en PVC et ABS
- Dimensions du siège : 457 x 290 mm
- Hauteurs de siège : 09 107 2867 (AA1155A) 152 mm
09 107 2875 (AA1155B) 203 mm
09 107 2883 (AA1155C) 305 mm

Entretien et Nettoyage

- Nous conseillons d'inspecter régulièrement le siège de bain à la recherche de toute trace d'usure et de détérioration excessive.
- Nettoyer à l'aide d'un tissu humide et d'un détergent non-abrasif.

Pièces de rechange

Des pieds à ventouses de rechange sont disponibles par paquets de quatre – code produit 09 107 2859 (AA115501)

Veillez conserver ce mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure et assurez-vous que l'utilisateur les a lues et comprises.

Ce mode d'emploi est disponible en gros caractère, merci de contacter le Service Clients de Homecraft Rolyan pour en obtenir un exemplaire.

Homecraft Rolyan, Une Société Patterson Medical,
Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, Royaume-Uni, NG17 2HU
Royaume-Uni : Tél : +08444 123 330 Fax : 08448 730 100 www.homecraftrolyan.com
International : Tél : +44 1623 448 706 Fax : +44 1623 448 724

Sammons Preston, 4 Sammons Court, Bolingbrook, IL 60440-5071, États-Unis.
Tél : 1-630-226-0000 Fax : 1-630-226-1390

Homecraft Rolyan
Une Société Patterson Medical